

C.V. MEDICA®

FICHAS TÉCNICAS

PRODUCTOS DE ENFERMERÍA

CABESTRILLOS:

- INMOVILIZADOR ACOLCHADO.



Fabricado por:
CVMEDICA, S.L.
Polígono Industrial La Plana · C/Ponent, 1
43424 Sarral- España
☎ +34 977 890 598
✉ +34 977 890 052
info@cvmedica.com

17/10/2013 Rev.04

FICHA TÉCNICA

INDICACIONES:


El cabestrillo acolchado es un inmovilizador que se utiliza para la sujeción e inmovilización del brazo/hombro afectados por lesiones o fracturas.

COMPOSICIÓN:


El cabestrillo acolchado esta compuesto por:
Velours marfil + relleno de espuma de poliuretano + velours blanco
Tiras de sujeción:
Velours marfil + relleno de espuma de poliuretano + velours marfil
Exento de látex



MODO DE EMPLEO:

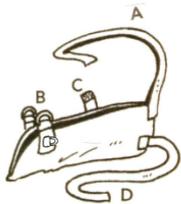

1. Desplegar el inmovilizador tal como indica la fotografía.

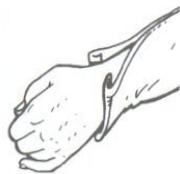


2. Colocar el brazo.



3. El brazo del paciente debe descansar sobre el mismo en ángulo recto.



4. Pasar la cinta de sujeción A por encima del brazo y ajustar la medida mediante la anilla B.

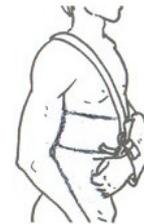

5. Pasar la otra cinta de sujeción D alrededor del tórax, inmovilizando el brazo.

CARACTERÍSTICAS :

- Diseñado para una aplicación y ajuste fácil. Forma anatómica.
- Bolsillo de gran profundidad para mejorar la posición del brazo y permitir mayor confort.
- Soporta el antebrazo y la muñeca.
- Presenta una correa vertical ajustable, no deformable, con enganches, su función es distribuir el peso del brazo a través de la espalda y el hombro para una mayor comodidad.
- La cinta C facilita el ajuste del cabestrillo al brazo.
- La cinta torácica limita el movimiento del hombro.
- Sistema de sujeción tipo Velcro.
- Lavable a 40°/60°C.

FICHA TÉCNICA

MEDIDAS DE LA UNIDAD DE PRODUCTO:

Para determinar el tamaño, medir la longitud del antebrazo desde el codo hasta los nudillos.

REFERENCIA	MODELO	L (cm)	A (cm)	L CINTA (cm)	A CINTA (cm)
1000700	EXTRA GRANDE	49	19	140 TORAX 110 CUELLO	5 5
1000701	GRANDE	46	17	140 TORAX 110 CUELLO	5 5
1000702	MEDIANO	42	16	140 TORAX 97 CUELLO	5 5
1000703	PEQUEÑO	31	14	75 TORAX 75 CUELLO	5 5
1000704	EXTRA PEQUEÑO	26	11	75 TORAX 75 CUELLO	5 5



PRESENTACIÓN:

REFERENCIA	MODELO	UNIDADES CAJA	MEDIDAS CAJAS (cm)	PESO CAJA (kg)
1000700	EXTRA GRANDE	10	31x21x23	1.1
1000701	GRANDE	10	31x21x23	1.2
1000702	MEDIANO	10	31x21x23	1.2
1000703	PEQUEÑO	10	30x22x15	0.90
1000704	EXTRA PEQUEÑO	10	30x22x15	0.90

CUMPLE CON:

- PRODUCTOS SANITARIOS. SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. REQUISITOS PARA FINES REGLAMENTARIOS. ISO 13485:2003.
- DIRECTIVA PRODUCTOS SANITARIOS 2007/47/EC: CLASE I
- LICENCIA FABR. NÚM: 3869-PS