

Inmovilizador Blue

Producto de Enfermería

INDICACIONES

Inmovilizador Blue es un producto sanitario que se emplea para la sujeción e inmovilizador de brazo y hombro afectados por lesiones o fracturas.

Se ha diseñado para una aplicación y ajuste fácil. Soporta antebrazo y muñeca e incorpora una tira soporte para el dedo pulgar. La cinta torácica limita el movimiento del hombro.



COMPOSICIÓN

Cabestrillo de Algodón azul 100%, con tiras de sujeción de Velours azul marino y espuma de poliuretano y cierres velcro. Las anillas de sujeción son de Nylon 100%.

MODO DE EMPLEO

- Colocar el codo en el cabestrillo y pase la correa del cuello por la parte posterior y sobre el hombro sano.
- Pase el extremo de la otra correa por el aro y abróchelo.
- Para colocar el cabestrillo de manera adecuada, la mano debe estar ligeramente elevada por encima del codo.
- Si lo desea, coloque el pulgar en la cinta para su apoyo.

CARACTERÍSTICAS

Las longitudes de las tiras son ajustables mediante la combinación del sistema velcro.

El sistema de fijación velcro permite una sujeción efectiva y eficaz.

Los materiales empleados para la fabricación de nuestros productos son hipoalérgicos utilizándose preferentemente fibras naturales para las superficies en contacto con la piel.

No se han descrito reacciones cutáneas, no obstante, si las hubiere se recomienda consultar al prescriptor. Le recomendamos que periódicamente revise el buen funcionamiento del sistema velcro.

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

El uso por más de un paciente puede provocar una infección cruzada.

No utilizar el producto sobre piel lesionada.

No utilizar el producto si éste se encuentra contaminado, sucio o evidentemente deteriorado.

ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL

Manténgase fuera de la luz del sol. Manténgase seco.

Caducidad: 5 años.

MEDIDAS DE LA UNIDAD DE PRODUCTO

Para determinar el tamaño, medir la longitud del antebrazo desde el codo hasta los nudillos.

La elección de la talla adecuada, así como la correcta colocación del producto en la zona a tratar son fundamentales para cumplir con eficacia la función del mismo, para su vida útil y para la seguridad en su uso.

En el envase se adjunta un cuadro orientativo de tallas y equivalencias en centímetros que puede ayudar al profesional en la elección de la misma.

Hay que recordar que una prenda holgada puede disminuir la eficacia terapéutica del producto y una demasiado ceñida puede influir negativamente en la circulación sanguínea o en otras enfermedades diferentes a las que pretendemos tratar.

REFERENCIA	MODELO	L (cm)	A (cm)	L CINTA (cm)	A CINTA (cm)
1012915B	EXTRA GRANDE	51	23	120 TÓRAX 110 CUELLO	4 4
1012925B	GRANDE	47	23	120 TORAX 110 CUELLO	4 4
1012935B	MEDIANO	39	21	120 TORAX 110 CUELLO	4 4
1012945B	PEQUEÑO	34	18	75 TORAX 75 CUELLO	4 4
1012955B	EXTRA PEQUEÑO	28	16	75 TORAX 75 CUELLO	4 4

PRESENTACIÓN			
REFERENCIA	UNIDADES CAJA	MEDIDAS CAJA (cm)	PESO CAJA (kg)
1012915B	20 uds/caja	31x21x23	2.5
1012925B	20 uds/caja	31x21x23	2.2
1012935B	20 uds/caja	31x21x23	1.8
1012945B	20 uds/caja	31x21x23	1.6
1012955B	20 uds/caja	30x22x15	1.4

TOLERANCIA DE PESO ±10%

CUMPLE CON:

- Directiva 93/42/CEE del Consejo, Directiva 2007/47/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Clase I, no estéril (de acuerdo a Anexo IX de la Directiva 93/42 y Anexo VIII del Reglamento 745/2017).
- Empresa certificada por la ISO 13485 e ISO 9001.
- Licencia de Funcionamiento Fabricante Productos Sanitarios No.: 3689-PS.