

Suspensorios Médicos

INDICACIONES

El **Suspensorio Médico** es un producto sanitario para la zona genital masculina en pacientes con epididimitis, hidrocele, varicocele, hematocele, espermatocele o alteraciones fisiológicas locales, entre otras enfermedades.

Indicado para la sujeción posquirúrgica en hernias y otras intervenciones.

COMPOSICIÓN

Bolsa de algodón 100%.
Cinta de poliéster.
Bajo nalgas de lycra.
Hebilla de nylon.



MODO DE EMPLEO

- Consultar las medidas de la bolsa para escoger la talla necesaria.
- Ponerlo como un slip y levantarlo hasta hacer que la cinta llegue a la altura de la cintura y la bolsa sujete los genitales de forma confortable.
- Pasar la cinta por la hebilla hasta que el suspensorio quede bien sujeto.
- Separa las cintas bajo nalgas a izquierda y derecha, situándolas en la zona inguinal.
- Cortar la cinta sobrante si se desea.

CARACTERÍSTICAS

Cinta de gran longitud para óptima fijación.
La bolsa de algodón previene roces y evita humedades.
Gran capacidad en tallas 13 y 14.
Lavado fácil.



ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

El uso por más de un paciente puede provocar una infección cruzada.
No utilizar el producto sobre piel lesionada.
No utilizar el producto si éste se encuentra contaminado, sucio o evidentemente deteriorado.

ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL

Manténgase fuera de la luz del sol. Manténgase seco.
Caducidad: 5 años.

MEDIDAS DE LA UNIDAD DE PRODUCTO

Es importante medir el largo y ancho de la bolsa para escoger la talla más adecuada. Hay que recordar que una prenda holgada puede disminuir la eficacia terapéutica del producto y una demasiado ceñida puede influir negativamente en la circulación sanguínea o en otras enfermedades diferentes a las que pretendamos tratar.

REFERENCIA	MODELO	PERÍMETRO CINTURA (cm)	L bolsa (cm)	A bolsa (cm)
1070811	T1	117	10.6	10
1070812	T2	117	11.25	10.5
1070813	T3	117	12	11
1070814	T4	117	12.75	11.5
1070815	T5	117	13.75	12
1070816	T6	117	14.5	13
1070817	T7	117	15	13.5
1070818	T8	117	15.75	14.50
1070819	T9	117	16.5	15
1070820	T10	150	17.75	15.75
1070821	T11	150	18.5	16.75
1070822	T12	150	19.5	17.25
1070823	T13	150	20.5	17.75
1070824	T14	150	21.5	18.75

PRESENTACIÓN			
REFERENCIA	UNIDADES CAJA	MEDIDAS CAJA (cm)	PESO CAJA* (kg)
1070811-822	10 uds/caja	18x17x9	0.6

* TOLERANCIAS: Peso $\pm$ 0.1 Kg

CUMPLE CON:

- Directiva 93/42/CEE del Consejo, Directiva 2007/47/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Clase I, no estéril (de acuerdo a Anexo IX de la Directiva 93/42 y Anexo VIII del Reglamento 745/2017).
- Empresa certificada por la ISO 13485 e ISO 9001.
- Licencia de Funcionamiento Fabricante Productos Sanitarios No.: 3689-PS.

