

Protector Codo-Talón Extra & Confort

Producto de Enfermería

INDICACIONES



Protector Codo-Talón es un producto sanitario que se emplea en la prevención de la aparición de escaras en pacientes que han de permanecer largo tiempo en cama o silla. Adicionalmente puede emplearse como sujeción del apósito.

COMPOSICIÓN

1080250	Producto compuesto por poliéster a nivel de la malla externa y del interior, así como del relleno. Las tiras de sujeción son de poliamida.
1000610	Producto compuesto por material tricapa formado por poliamida, espuma y algodón.

MODO DE EMPLEO

- Desplegar el protector codo-talón.
- Colocar el protector en la base del codo o talón de manera que el punto de presión de los mismos coincida con el refuerzo interior.
- Ajustar la cinta o cintas mediante el cierre de velcro que incorporan

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS	VENTAJAS	BENEFICIOS
Diseño Anatómico	Asegura una perfecta adaptación tanto al codo como al talón. Impide al protector girar o desplazarse.	Se coloca directamente debajo del punto de presión del codo/talón, resultando muy confortable para el paciente. Permite reducir costes en uso e inventario.
Tipo de Material ¹	Material de elevada resistencia.	Mayor durabilidad del producto.
Cojín de tres capas	Presenta una pequeña elevación para el punto de presión del codo/talón.	Suavidad y comodidad para el paciente.
Cierre con sistema velcro	Ajustable. Seguro.	Flexibilidad en el ajuste. Seguridad en la sujeción.
Uso individual	Terapia individualizada.	Elimina el riesgo de contaminación cruzada.
Cinta amplia	Ajuste de la protección al paciente, evitando la rotación.	Suave y ligera. Comodidad y Seguridad.
Usabilidad	Fácil de aplicar, escaso mantenimiento.	Ahorro de tiempo al personal de enfermería y cuidados.

NOTA 1: Tipo de Material de la Referencia 1000610.

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

El uso por más de un paciente puede provocar una infección cruzada.
 No utilizar el producto sobre piel lesionada.
 No utilizar el producto si éste se encuentra contaminado, sucio o evidentemente deteriorado.

ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL

Manténgase fuera de la luz del sol. Manténgase seco.
 Caducidad: 5 años.

MEDIDAS DE LA UNIDAD DE PRODUCTO

REFERENCIA	MODELO	Largo	Ancho	Largo – Cinta	Ancho - Cinta
1080250	Extra	27 cm	29 cm	28 cm	5 cm
1000610	Confort	21 cm	27 cm	28 cm	5 cm

PRESENTACIÓN			
REFERENCIA	UNIDADES CAJA	MEDIDAS CAJA (cm)	PESO CAJA (kg)
1080250	20 uds/caja	31 * 21 * 30	1.02
1000610	60 uds/caja	40 * 25 * 40	1.88

Código de barras (EAN14, caja):

Referencia: 1080250	18427835102553
Referencia: 1000610	18427835101594

CUMPLE CON:

- Directiva 93/42/CEE del Consejo, Directiva 2007/47/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Clase I, no estéril (de acuerdo a Anexo IX de la Directiva 93/42 y Anexo VIII del Reglamento 745/2017).
- Empresa certificada por la ISO 13485 e ISO 9001.
- Licencia de Funcionamiento Fabricante Productos Sanitarios No.: 3689-PS.

