

Cojín Punteado

Producto de Enfermería

INDICACIONES

Cojín Punteado es un producto sanitario que se emplea para la prevención de escaras de los pacientes que han de permanecer largo tiempo en silla.

Además, el cojín puede introducirse en una funda impermeable que evitará su deterioro por derrame de líquidos.



COMPOSICIÓN

El cojín está compuesto por Algodón 100% ignífugo con un relleno de fibra de poliéster siliconada. La funda es de tejido impermeable 100% poliamida.

MODO DE EMPLEO

- Extraer el cojín de la bolsa y asirlo siempre por un lateral.
- Introducir el cojín en la correspondiente funda impermeable.
- Colocar el cojín punteado en la zona de asiento de la silla de ruedas.

CARACTERÍSTICAS

El relleno de fibra de poliéster siliconada permite una recuperación y reacción inmediata a cualquier presión aplicada, consiguiendo una óptima repartición del peso.

Su peso reducido hace muy manejable su uso y traslado.

El conjunto de fibras proporciona una ventilación constante, evitando la acumulación y absorción de humedad.

El material de la funda transpirable incorpora micro poros los cuales dejan pasar libremente la temperatura ofreciendo a la vez una impermeabilidad absoluta.

Lavar a mano con agua fría y productos no abrasivos. Después del lavado dejar secar en posición horizontal.



ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

El uso por más de un paciente puede provocar una infección cruzada.

No utilizar el producto sobre piel lesionada.

No utilizar el producto si éste se encuentra contaminado, sucio o evidentemente deteriorado.

ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL

Manténgase fuera de la luz del sol. Manténgase seco.

Caducidad: 5 años.

MEDIDAS DE LA UNIDAD DE PRODUCTO

REFERENCIA	MODELO	L (cm)	A (cm)
5020100	COJÍN PUNTEADO	48	48
5020200	FUNDA	49	51

PRESENTACIÓN

REFERENCIA	UNIDADES BOLSA	MEDIDAS CAJA (cm)	PESO CAJA (kg)
5020100	1 uds/bolsa	49x50x7	0.9
5020200	1 uds/bolsa	35x37	0.1

TOLERANCIA DE PESO $\pm 10\%$
CUMPLE CON:

- Directiva 93/42/CEE del Consejo, Directiva 2007/47/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Clase I, no estéril (de acuerdo a Anexo IX de la Directiva 93/42 y Anexo VIII del Reglamento 745/2017).
- Empresa certificada por la ISO 13485 e ISO 9001.
- Licencia de Funcionamiento Fabricante Productos Sanitarios No.: 3689-PS.



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
ISO 22716:2007
www.tuv.com
ID: 9106078921