

DISPOMEDIC SCRUB DRY

Cepillo / Esponja seco estéril

DESCRIPCIÓN:

Cepillo/Esponja seco estéril con posibilidad de incorporar un limpiaúñas, indicado para el lavado de manos del personal técnico-sanitario. Lavado de manos en zonas de alto riesgo. Higiene del paciente preoperatorio.

COMPOSICIÓN:

CEPILLO: Polietileno
 ESPONJA: 100% espuma de poliuretano
 LIMPIAÚÑAS*: copolímero de ABS (acrilonitrilo butadieno estireno)
 Libre de látex.



INSTRUCCIONES

La finalidad prevista es la limpieza de las manos y uñas de pacientes y personal sanitario. Debe utilizarse de la siguiente manera: Sacar el cepillo del envoltorio ayudándose de la apertura fácil ubicada en un extremo del envase. Una vez extraído el cepillo del envoltorio sujetarlo por la zona media y desechar el envoltorio. Proceder a la limpieza de las manos y uñas, impregnando si procede, la esponja con un antiséptico, el cual no va incluido en este producto. Usar el limpia uñas para las zonas de difícil acceso. Una vez utilizado, desecharlo. No reutilizar.

CARACTERÍSTICAS

Cepillo con cerdas unido a una suave esponja. Diseño anatómico para obtener una mayor comodidad y flexibilidad para el usuario. Puede contener un dispositivo limpiaúñas para ayudar en la función de limpieza. Esterilizado mediante OE.

MEDIDA DEL PRODUCTO UNITARIO:

80 x 50 x 37 mm ± 2.5 mm

PRESENTACION				
REFERENCIA	DESCRIPCION	UNID/CAJA	MEDIDAS CAJA (cm)	PESO CAJA** (kg)
0030200	DISPOMEDIC SCRUB DRY	100	38 x 21 x 35 Caja con apertura lateral	1.9
0030200B	DISPOMEDIC SCRUB DRY *con limpiaúñas	100	38 x 21 x 35 Caja con apertura lateral	2.0
0030200C	DISPOMEDIC SCRUB DRY	450	60 x 39.5 x 50.5 15 dispensadores de 30 Uds.	10.4
0030200D	DISPOMEDIC SCRUB DRY *con limpiaúñas	450	60 x 39.5 x 50.5 15 dispensadores de 30 Uds.	10.7

** TOLERANCIAS: Peso ± 0.5 Kg

CUMPLE CON:

ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de la Calidad.

