

Disposin one

Éponges sans savon non réutilisables

Disposin one est une éponge hygiénique, particulièrement adaptée pour un usage médical et l'application de soins. Elle est jetable et recyclable. Cette éponge peut incorporer le savon le plus approprié. Il faut souligner sa grande douceur au toucher.

Le produit est spécialement conçu pour le soin et le nettoyage de la peau, notamment pour les personnes qui ont besoin d'une attention particulière.



Informations du produit

ÉPONGE : Mousse de polyuréthane. Sans latex.

Grammage	Dimensions de l'unité
15 kg/m ³ ±5 %	13x8x2.5 cm ±5 %

DISPOSIN ONE, avec son concept d'**UN SEUL USAGE**, élimine radicalement toute possibilité de réinfection avec la sécurité absolue qu'elle ne sera pas utilisée une seconde fois.

Ce produit ne présente pas d'incompatibilité avec d'autres produits.

Mode d'emploi

- Humidifier l'éponge **DISPOSIN ONE** et ajouter le savon.
- Frotter doucement et savonner la peau.
- Rincer à l'eau, si nécessaire.

Avertissements et Recommandations

Tenir hors de portée des enfants. Ne pas avaler. Usage externe.

Utiliser des récipients correctement désinfectés pour chaque bain des patients. Utiliser de l'eau tiède pour le confort du patient.

Jeter après usage.

Stockage et durée d'utilisation

Conserver dans un endroit frais et sec. Protéger de la lumière du soleil.

PRÉSENTATION

RÉFÉRENCE	EMBALLAGE	UNITÉS BOÎTE	DIMENSIONS BOÎTE (cm)	POIDS BOÎTE* (kg)
0005410	Multiple	1000 unités (20 paquets de 50 unités)	77x45x83 (sac)	4.0
0005410C	Individuel	1000 unités (20 paquets de 50 unités)	80x70x48 (sac)	4.1
0005410D	Individuel	2000 unités (40 paquets de 50 unités)	78x37x68.3	11.6
0005410E	Multiple	500 unités (50 paquets de 10 unités)	70x44x48	3.3
0005410F	Multiple	2000 unités (40 paquets de 50 unités)	78x29x66	10

* TOLÉRANCES : Poids ± 0.5 Kg

Conforme à :

- Bonnes pratiques de fabrication des produits cosmétiques selon la norme ISO 22716.
- Entreprise certifiée ISO 22716 et ISO 9001.