

Dispofoam one

Éponges savonneuses à usage unique

Dispofoam one est une éponge savonneuse hygiénique, spécialement indiquée pour un usage médical et l'application de soins, jetable et recyclable, prête à libérer toutes ses propriétés dès qu'elle entre en contact avec l'eau. Avec un savon qui aide à maintenir la barrière protectrice de la peau et qui procure également un parfum agréable et frais.

Le produit est spécialement conçu pour le soin et le nettoyage de la peau, notamment pour les personnes qui ont besoin d'une attention particulière.

Éponge d'une douceur maximale.



Informations du produit

ÉPONGE : Mousse de polyuréthane. Sans latex.

SAVON : Gel dermatologique pH 5.5 ±0,5. Apte pour les enfants.

Densité de l'éponge	Dimensions de l'unité
15 kg/m ³ ±5 %	13x8x2.5 cm ±5 %

Ingrédients	
Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Chloride, Cocamide Dea, Cocamidopropyl Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Citric Acid, Parfum, C.I. 61570, Linalool.	Betaine,

Chaque éponge contient 2-3 g de savon avant le séchage.

Qualité microbiologique contrôlée.

Gel spécialement formulé avec une forte présence d'ingrédients émoullissants pour la protection de la peau, qui peuvent réduire la mousse pendant l'utilisation, sans diminuer la capacité de nettoyage de la peau.

Mode d'emploi



Le savon de l'éponge **DISPOFOAM ONE** est activé avec quelques gouttes d'eau. **NE PAS PLONGER DANS L'EAU.**

- Frotter doucement et savonner la peau.
- Rincer à l'eau et sécher soigneusement la peau après le bain.

Avertissements et Recommandations

Tenir hors de portée des enfants.

Ne pas avaler. Éviter tout contact avec les yeux. Usage externe.

Utiliser des récipients correctement désinfectés pour chaque bain des patients.

Utiliser de l'eau tiède pour le confort du patient.

Jeter après usage

Stockage et durée d'utilisation

Conserver dans un endroit frais et sec. Protéger de la lumière du soleil.

Expiration : 5 ans.

PRÉSENTATION				
RÉFÉRENCE	EMBALLAGE	UNITÉS BOÎTE	DIMENSIONS BOÎTE (cm)	POIDS BOÎTE* (kg)
0005412	Individuel	1000 unités 20 sacs de 50 unités.	80x65x50 (sac)	5.4
0005412B	Individuel comprimé	2000 unités 40 sacs de 50 unités.	78x37x68.3	13.1
0005412D	Individuel	500 unités 10 sacs de 50 unités.	70x44x48	3.7
0005412E	Individuel comprimé	1000 unités 20 sacs de 50 unités.	70x44x48	6.5
0005412H	Multiple comprimé	2000 unités 40 sacs de 50 unités.	78x29x66	11.3
0005412I	Multiple	1000 unités 20 sacs de 50 unités.	84x50x73 (sac)	4.1
0005412P	Multiple comprimé	1000 unités 20 sacs de 50 unités.	70x44x48	6.6

* TOLÉRANCES : Poids \pm 0.5 Kg

Code-barres emballage individuel : EAN13 8427835100736

Conforme à :

- Bonnes pratiques de fabrication des produits cosmétiques selon la norme ISO 22716.
- Règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux produits cosmétiques.
- Testé sous contrôle pédiatrique.
- Testé sous contrôle dermatologique.
- Testé sous contrôle gynécologique.
- Entreprise certifiée ISO 22716 et ISO 9001.

