

Inmovilizador de Extremidades Confort de Seguridad

INDICACIONES


Inmovilizador de Extremidades Confort de Seguridad es un producto sanitario que se emplea como inmovilizador de extremidades, para usar en las camas y donde se requiera una sujeción firme y segura, evitando movimientos bruscos.



COMPOSICIÓN

Producto con material tricapa, interior de algodón, exterior de poliamida y con relleno de espuma de poliuretano, con cintas a doble cara de poliéster. Anilla de polipropileno.

MODO DE EMPLEO

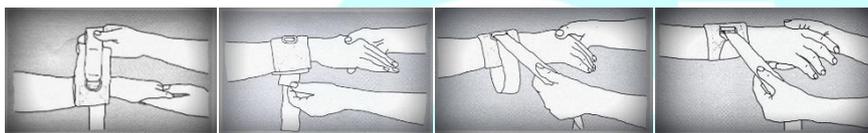

- Desplegar el inmovilizador y colocarlo alrededor de la muñeca o tobillo.
- Ajustar el inmovilizador mediante el sistema velcro al diámetro deseado.
- Pasar la cinta de sujeción a través de la anilla.
- Asegurar la cinta, fijarla y anudarla a la estructura, preferiblemente metálica, de la cama o similar, de forma que el inmovilizador quede tensado.

CARACTERÍSTICAS

Suavidad y comodidad gracias al almohadillado de mayor grosor. Elevada resistencia, permitiendo la circulación. Transpirable, evita irritaciones en la piel, el recalentamiento, la humedad y la maceración.

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

El uso por más de un paciente puede provocar una infección cruzada.
No utilizar el producto sobre piel lesionada.
No utilizar el producto si éste se encuentra contaminado, sucio o evidentemente deteriorado.

ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL

Manténgase fuera de la luz del sol. Manténgase seco.
Caducidad: 5 años.

MEDIDAS DE LA UNIDAD DE PRODUCTO

Gracias a su diseño anatómico, el producto se adapta perfectamente a cada paciente, permitiendo ser utilizado indistintamente en las muñecas o tobillos.

REFERENCIA	MODELO	LONGITUD (cm)	ANCHO (cm)
1000202	GRANDE	168	7.5
1000405	PEQUEÑO	135	5.5

PRESENTACIÓN			
REFERENCIA	UNIDADES CAJA	MEDIDAS CAJA (cm)	PESO CAJA (kg)
1000202	60 uds/caja	31*21*23	1.80
1000405	60 uds/caja	30*22*15	1.11

CUMPLE CON:

- Directiva 93/42/CEE del Consejo, Directiva 2007/47/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Clase I, no estéril (de acuerdo a Anexo IX de la Directiva 93/42 y Anexo VIII del Reglamento 745/2017).
- Empresa certificada por la ISO 13485 e ISO 9001.
- Licencia de Funcionamiento Fabricante Productos Sanitarios No.: 3689-PS.

