

# Immobilisateur de Membres Confort

## INDICATIONS

**Immobilisateur de Membres Confort** est un dispositif médical utilisé pour immobiliser les membres, pour une utilisation dans les lits et partout où une fixation ferme et sûre est nécessaire, notamment pour éviter les mouvements brusques. Produit équipé d'un coussin souple avec des bandes de fixation.




## COMPOSITION

Produit avec un matériau à trois couches, intérieur en coton, extérieur en polyamide et rembourrage en mousse de polyuréthane, avec des bandes de polyester double face. Anneau en polypropylène.

## MODE D'EMPLOI

- Déplier l'immobilisateur et le placer autour du poignet ou de la cheville.
- Ajuster l'immobilisateur à l'aide du système velcro au diamètre souhaité.
- Attacher les sangles à la structure, de préférence métallique, du lit ou similaire, de sorte que l'immobilisateur soit tendu.

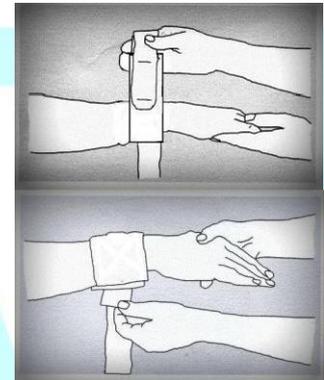

## CARACTÉRISTIQUES

Douceur. Haute résistance, permettant la circulation. Respirant, il empêche l'irritation de la peau, la surchauffe, l'humidité et la macération.

## AVERTISSEMENTS ET RECOMMANDATIONS

L'utilisation par plus d'un patient peut entraîner une infection croisée.

Ne pas utiliser le produit sur une peau blessée.

Ne pas utiliser le produit s'il est contaminé, sale ou manifestement endommagé.

## STOCKAGE ET DURÉE D'UTILISATION

Ne pas exposer à la lumière du soleil. Le garder au sec.

Expiration : 5 ans.

**DIMENSIONS DE L'UNITÉ DE PRODUIT**

Grâce à sa conception anatomique, le produit s'adapte parfaitement à chaque patient, ce qui permet de l'utiliser indistinctement sur les poignets ou les chevilles.

RÉFÉRENCE	MODÈLE	LONGUEUR (cm)	LARGEUR (cm)
1000303	GRAND	168	7.5
1000404	PETIT	135	5.5

PRÉSENTATION			
RÉFÉRENCE	UNITÉS BOÎTE	DIMENSIONS BOÎTE (cm)	POIDS BOÎTE (kg)
1000303	60 unités/boîte	31*21*23	1.66
1000404	60 unités/boîte	30*22*15	1.10

**CONFORME À :**

- Directive 93/42/CEE du Conseil, Directive 2007/47/CE du Parlement européen et du Conseil et Règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil.
- Classe I, non stérile (conformément à l'Annexe IX de la Directive 93/42 et à l'Annexe VIII du Règlement 745/2017).
- Entreprise certifiée ISO 13485 et ISO 9001.
- Licence de Fonctionnement Fabricant Produits Médicaux n° : 3689-PS.

