

Inmovilizador Clavícula

INDICACIONES

El **Inmovilizador de Clavícula** es un producto sanitario que se emplea para la sujeción e inmovilización de clavículas afectadas por lesiones o fracturas.

COMPOSICIÓN

Producto compuesto por material tricapa en soporte y tiras.

Soporte: Interior de algodón y exterior de poliamida, con relleno de poliuretano.

Tiras: Interior y exterior de poliéster, con relleno de poliuretano.

Anilla de polipropileno.



MODO DE EMPLEO

- Sacar el Inmovilizador de su acondicionamiento, pasar las cintas por las anillas y adherir el sistema velcro con las almohadillas provistas para ello.
- Ponerse el Inmovilizador como si se tratase de un chaleco.
- Ajustar el Inmovilizador, hasta sentirlo bien sujeto.

CARACTERÍSTICAS

Ayuda a mantener la postura idónea.

Producto muy fácil de ajustar, gracias a los 4 puntos de ajuste.

Puede llevarse debajo de la ropa. Las tiras incorporan un acolchado a nivel axilar para incrementar la comodidad del paciente. Dispone de 4 hebillas que facilitan su posicionamiento, evitando deslizamientos involuntarios.

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

El uso por más de un paciente puede provocar una infección cruzada.

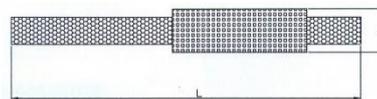
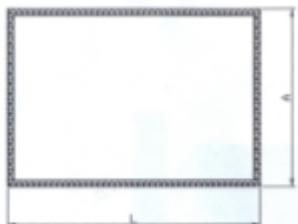
No utilizar el producto sobre piel lesionada.

No utilizar el producto si éste se encuentra contaminado, sucio o evidentemente deteriorado.

ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL

Manténgase fuera de la luz del sol. Manténgase seco.

Caducidad: 5 años.

MEDIDAS DE LA UNIDAD DE PRODUCTO


REFERENCIA	MODELO	LONGITUD (cm)	ANCHO (cm)	L. Tira (cm)	A. Tira (cm)
1000705	GRANDE	16	11	108	5
1000706	MEDIANO	16	11	91	5
1000707	PEQUEÑO	16	11	80	5
1000711	EXTRA PEQUEÑO	16	11	72	5

PRESENTACIÓN			
REFERENCIA	UNIDADES CAJA	MEDIDAS CAJA (cm)	PESO CAJA (kg)
1000705	10 uds/caja	31x21x23	1.22
1000706	10 uds/caja	31x21x23	1.14
1000707	10 uds/caja	31x21x23	1.12
1000711	10 uds/caja	30x22x15	1.00

CUMPLE CON:

- Directiva 93/42/CEE del Consejo, Directiva 2007/47/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Clase I, no estéril (de acuerdo a Anexo IX de la Directiva 93/42 y Anexo VIII del Reglamento 745/2017).
- Empresa certificada por la ISO 13485 e ISO 9001.
- Licencia de Funcionamiento Fabricante Productos Sanitarios No.: 3689-PS.

