

# Inmovilizador Hombro Gris

## INDICACIONES

El **Inmovilizador Hombro Gris** es un producto sanitario que se emplea para la sujeción e inmovilización del brazo/hombro afectado por lesiones o fracturas.

## COMPOSICIÓN

Producto compuesto por material tricapa de poliamida y poliuretano, con anillas de polipropileno. Tira apoya dedos de poliéster.



## MODO DE EMPLEO



- Desplegar el inmovilizador desplegando las tiras.
- Colocar el brazo en el inmovilizador. Apoyar el dedo pulgar y ajustar la cinta B.
- El brazo del paciente debe descansar sobre el mismo en ángulo recto.
- Pasar la cinta de sujeción A por encima del brazo y ajustar la medida mediante la anilla B.
- Pasar la otra cinta de sujeción alrededor del tórax, inmovilizando el brazo.

## CARACTERÍSTICAS

Diseñado para una aplicación y ajuste fácil.

Dispone de sistema velcro para el cierre y ajuste.

Soporta el antebrazo y la muñeca. Incorpora tira de soporte para el dedo pulgar.

Presenta una correa vertical ajustable con enganches, cuya función es distribuir el peso del brazo a través de la espalda y el hombro para una mayor comodidad. La cinta torácica limita el movimiento del hombro.

## ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

El uso por más de un paciente puede provocar una infección cruzada.

No utilizar el producto sobre piel lesionada.

No utilizar el producto si éste se encuentra contaminado, sucio o evidentemente deteriorado.

## ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL

Manténgase fuera de la luz del sol. Manténgase seco.

Caducidad: 5 años.

### MEDIDAS DE LA UNIDAD DE PRODUCTO

Para determinar el tamaño a seleccionar, medir la longitud del antebrazo desde el codo hasta los nudillos.



REFERENCIA	MODELO	LONGITUD (cm)	ANCHO (cm)	L. Cinta (cm)	A. Cinta (cm)
1000720	XL	49	19	Tórax: 140 Cuello: 110	5
1000721	L	46	17	Tórax: 140 Cuello: 110	5
1000722	M	42	16	Tórax: 140 Cuello: 110	5
1000723	S	31	14	Tórax: 75 Cuello: 75	5
1000724	XS	26	11	Tórax: 75 Cuello: 75	5

PRESENTACIÓN			
REFERENCIA	UNIDADES CAJA	MEDIDAS CAJA (cm)	PESO CAJA* (kg)
1000720	10 uds/caja	31*21*23	1.14
1000721	10 uds/caja	31*21*23	0.97
1000722	10 uds/caja	31*21*23	0.77
1000723	10 uds/caja	30*22*15	0.7
1000724	10 uds/caja	30*22*15	0.7

\* TOLERANCIAS: Peso  $\pm$  0.2 Kg

### CUMPLE CON:

- Directiva 93/42/CEE del Consejo, Directiva 2007/47/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Clase I, no estéril (de acuerdo a Anexo IX de la Directiva 93/42 y Anexo VIII del Reglamento 745/2017).
- Empresa certificada por la ISO 13485 e ISO 9001.
- Licencia de Funcionamiento Fabricante Productos Sanitarios No.: 3689-PS.

