

# Immobilisateur Épaule Maille


## INDICATIONS

L'**Immobilisateur Épaule Maille** est un dispositif médical utilisé pour le soutien et l'immobilisation du bras/épaule affecté par des blessures ou des fractures.

## COMPOSITION

Produit composé d'une maille et de sangles de fixation en polyester, avec des anneaux en polypropylène.

## MODE D'EMPLOI

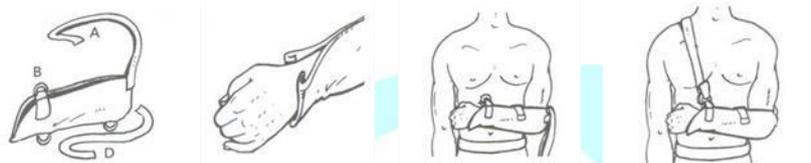

- Déplier l'immobilisateur en dépliant les sangles.
- Placer le bras.
- Le bras du patient doit reposer sur ce dernier en angle droit.
- Passer la sangle de fixation "A" au-dessus du bras et ajuster la dimension à l'aide de l'anneau "B".
- Passer l'autre bande de fixation autour du thorax, en fixant les extrémités de la bande "D" avec les boucles inférieures.
- Une sangle de soutien du doigt est incluse dans l'immobilisateur.

## CARACTÉRISTIQUES

Produit conçu pour une application et un réglage faciles.

Il dispose d'un système velcro pour la fermeture et le réglage de l'inclinaison.

Soutient l'avant-bras et le poignet. La sangle thoracique limite le mouvement de l'épaule.

Il est doté d'une courroie verticale réglable avec des crochets, dont la fonction est de distribuer le poids du bras sur le dos et l'épaule pour un plus grand confort. Comprend une sangle de soutien pour le pouce.

Matériau léger, confortable et respirant, mais qui conserve toute sa résistance et son adaptabilité au corps.

## AVERTISSEMENTS ET RECOMMANDATIONS

L'utilisation par plus d'un patient peut entraîner une infection croisée.

Ne pas utiliser le produit sur une peau blessée.

Ne pas utiliser le produit s'il est contaminé, sale ou manifestement endommagé.

## STOCKAGE ET DURÉE D'UTILISATION

Ne pas exposer à la lumière du soleil. Le garder au sec.

Expiration : 5 ans.

### DIMENSIONS DE L'UNITÉ DE PRODUIT

Pour déterminer la taille à choisir, mesurer la longueur de l'avant-bras, du coude aux jointures.



RÉFÉRENCE	MODÈLE	LONGUEUR (cm)	LARGEUR (cm)	L. Bande (cm)	H. Bande (cm)
1012825	L	46	21	Thorax : 111 Cou : 97	4 4
1012835	M	40	19	Thorax : 108 Cou : 97	4 4
1012845	S	32	16	Thorax : 74 Cou : 74	4 4

PRESENTATION			
REFERENCE	UNITES BOITE	DIMENSIONS BOITE (cm)	POIDS BOITE (kg)
1012825	10 unités/boîte	21x15x15	0.59
1012835	10 unités/boîte	21x15x15	0.57
1012845	10 unités/boîte	21x15x15	0.45

### CONFORME À :

- Directive 93/42/CEE du Conseil, Directive 2007/47/CE du Parlement européen et du Conseil et Règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil.
- Classe I, non stérile (conformément à l'Annexe IX de la Directive 93/42 et à l'Annexe VIII du Règlement 745/2017).
- Entreprise certifiée ISO 13485 et ISO 9001.
- Licence de Fonctionnement Fabricant Produits Médicaux n° : 3689-PS.

