

Gilet de Maintien Normal

Produit d'Infirmierie

INDICATIONS

Le **Gilet de Maintien Normal** est conçu pour fournir une sécurité maximale et un confort optimal au patient.

Indiqué notamment pour les zones hospitalières où les patients sont constamment mis et sortis du lit ou du fauteuil roulant, mais également utilisé en gériatrie et en soins intensifs.



COMPOSITION

Corps du Gilet : 100 % Polyamide

Sangles de fixation : 100 % TNT

Polyester

MODE D'EMPLOI

- Après avoir choisi la taille correcte, placez le gilet sur le patient, en veillant à ce que l'ouverture en "V" se trouve à l'avant.
- Croiser le gilet sur le devant et faire passer la bande gauche dans la fente de droite.
- Nouer les bandes au niveau du cou et assurez-vous que le gilet est bien positionné.
- Positionner le patient dans le lit ou le fauteuil roulant et nouer les bandes sur les côtés opposés.

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES	AVANTAGES	BÉNÉFICES
Deux bandes	Polyvalence d'application, s'adapte à chaque patient	Confort pour les infirmiers(ères) et confort pour le patient
Entrelacé	Facile à appliquer, réglable	S'adapte à chaque patient
Bandes de sécurité au dos	Permet un ajustement supplémentaire au patient	Davantage de sécurité
Fabriqué en tissu spécial	Permet la circulation de l'air	Frais et confortable
Bandes	Extra longues pour atteindre le cadre du lit	Flexibilité dans l'application
Surpiqûres supplémentaires sur les bandes	Produit solide, durabilité	Assure la fonction du produit
Bandes 100 % Polyester	Produit solide, durabilité	Produit fiable et durable
Terminaison de bande libre	Réglable	Flexibilité dans l'application et sécurité accrue

AVERTISSEMENTS ET RECOMMANDATIONS

L'utilisation par plus d'un patient peut entraîner une infection croisée.
 Ne pas utiliser le produit sur une peau blessée.
 Ne pas utiliser le produit s'il est contaminé, sale ou manifestement endommagé.

STOCKAGE ET DURÉE D'UTILISATION

Ne pas exposer à la lumière du soleil. Le garder au sec.
 Expiration : 5 ans.

DIMENSIONS DE L'UNITÉ DE PRODUIT

RÉFÉRENCE	MODÈLE	L (cm)	H (cm)	L BANDE (cm)
1015670	GRAND (BLEU)	56	50	135
1015660	MOYEN (VERT)	47	48	156
1015650	PETIT (BLANC)	41	48	150

PRÉSENTATION

RÉFÉRENCE	UNITÉS BOÎTE	DIMENSIONS BOÎTE (cm)	POIDS BOÎTE (kg)*
1015670	10 unités/boîte	31x21x30	2.7
1015660	10 unités/boîte	31x21x30	2.2
1015650	10 unités/boîte	31x21x30	1.7

TOLÉRANCE DE POIDS ±10 %

CONFORME À :

- Directive 93/42/CEE du Conseil, Directive 2007/47/CE du Parlement européen et du Conseil et Règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil.
- Classe I, non stérile (conformément à l'Annexe IX de la Directive 93/42 et à l'Annexe VIII du Règlement 745/2017).
- Entreprise certifiée ISO 13485 et ISO 9001.
- Licence de Fonctionnement Fabricant Produits Médicaux n° : 3689-PS.

