

# Chaleco de Sujeción Normal

## Producto de Enfermería

### INDICACIONES

El **Chaleco de Sujeción Normal** está diseñado para proporcionar la máxima seguridad y comodidad del paciente.

Indicado especialmente para áreas de hospitales donde los pacientes son constantemente puestos y levantados de la cama o silla de ruedas, también usado en geriatría y cuidados intensivos.



### COMPOSICIÓN

Cuerpo del Chaleco: Poliamida 100%  
Tiras de sujeción: TNT Poliéster 100%

### MODO DE EMPLEO

- Después de escoger la medida adecuada, colocar el chaleco al paciente, teniendo en cuenta que la apertura en "V" quede delante.
- Cruzar el chaleco por la parte delantera y pasar la cinta izquierda a través de la ranura derecha.
- Anudar las cintas que se encuentran a la altura del cuello y asegurarse del buen posicionamiento del chaleco.
- Posicionar al paciente en la cama o en la silla de ruedas y anudar las cintas en lados opuestos.

### CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS	VENTAJAS	BENEFICIOS
Dos cintas	Versatilidad en la aplicación, se adapta a cada paciente	Comodidad para las enfermeras y confort para el paciente
Entrelazado	Fácil de aplicar, ajustable	Se adapta a cada paciente
Cintas de seguridad en la espalda	Permite un ajuste adicional al paciente	Mayor seguridad
Fabricado con tejido especial	Permite la circulación del aire	Fresco y confortable
Cintas	Extra largas para alcanzar el bastidor de la cama	Flexibilidad en la aplicación
Cosido adicional en las cintas	Producto fuerte, durabilidad	Asegura la función del producto
Cintas 100% Poliéster	Producto fuerte, durabilidad	Producto fiable y duradero
Libre terminación de la cinta	Ajustable	Flexibilidad en la aplicación e incremento de la seguridad

**ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES**

El uso por más de un paciente puede provocar una infección cruzada.  
 No utilizar el producto sobre piel lesionada.  
 No utilizar el producto si éste se encuentra contaminado, sucio o evidentemente deteriorado.

**ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL**

Manténgase fuera de la luz del sol. Manténgase seco.  
 Caducidad: 5 años.

**MEDIDAS DE LA UNIDAD DE PRODUCTO**

REFERENCIA	MODELO	L (cm)	A (cm)	L CINTA (cm)
1015670	GRANDE (AZUL)	56	50	135
1015660	MEDIANO (VERDE)	47	48	156
1015650	PEQUEÑO (BLANCO)	41	48	150

**PRESENTACIÓN**

REFERENCIA	UNIDADES CAJA	MEDIDAS CAJA (cm)	PESO CAJA (kg)*
1015670	10 Uds./caja	31x21x30	2.7
1015660	10 Uds./caja	31x21x30	2.2
1015650	10 Uds./caja	31x21x30	1.7

 TOLERANCIA DE PESO  $\pm 10\%$ 
**CUMPLE CON:**

- Directiva 93/42/CEE del Consejo, Directiva 2007/47/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Clase I, no estéril (de acuerdo a Anexo IX de la Directiva 93/42 y Anexo VIII del Reglamento 745/2017).
- Empresa certificada por la ISO 13485 e ISO 9001.
- Licencia de Funcionamiento Fabricante Productos Sanitarios No.: 3689-PS.

