

# Protecteur Oculaire

## INDICATIONS

Le **Protecteur Oculaire** est un dispositif médical utilisé comme protecteur oculaire pédiatrique, indiqué pour la photothérapie.

## COMPOSITION

Produit avec un matériau à trois couches, intérieur en coton, extérieure en polyamide et rembourrage en mousse de polyuréthane.

## MODE D'EMPLOI

- Placer le protecteur autour des yeux du patient et le fixer à l'aide du système velcro.
- Passer la bande de fixation sur la tête et fixer le protecteur à l'aide du système velcro. Coupez l'excédent de bande, si nécessaire.

## CARACTÉRISTIQUES

Le produit est réglable grâce au système velcro, la bande élastique et le matériau de la couche extérieure. Le produit est respirant, non irritant, antiallergique. Le système de fixation velcro permet une fixation efficace et efficiente.

## AVERTISSEMENTS ET RECOMMANDATIONS

L'utilisation par plus d'un patient peut entraîner une infection croisée.  
Ne pas utiliser le produit sur une peau blessée.  
Ne pas utiliser le produit s'il est contaminé, sale ou manifestement endommagé.

## STOCKAGE ET DURÉE D'UTILISATION

Ne pas exposer à la lumière du soleil. Le garder au sec.  
Expiration : 5 ans.



**DIMENSIONS DE L'UNITÉ DE PRODUIT**

Pour choisir la bonne taille, il faut tenir compte du périmètre crânien et de la surface oculaire à protéger :

RÉFÉRENCE	MODÈLE	PÉRIMÈTRE CRÂNIEN	SURFACE OCULAIRE	BANDE SUPÉRIEURE
1029050	EXTRA-PETIT	25 – 30 cm	4 x 8 (cm)	25 cm
1029100	PETIT	30 – 35 cm	5 x 8 (cm)	29 cm
1029150	MOYEN	32 – 37 cm	6 x 9 (cm)	35 cm

PRÉSENTATION			
RÉFÉRENCE	UNITÉS BOÎTE	DIMENSIONS BOÎTE (cm)	POIDS BOÎTE (kg)
1029050	25 unités/boîte	20x15x15	0.4
1029100	25 unités/boîte	20x15x15	0.4
1029150	25 unités/boîte	20x15x15	0.42

**CONFORME À :**

- Directive 93/42/CEE du Conseil, Directive 2007/47/CE du Parlement européen et du Conseil et Règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil.
- Classe I, non stérile (conformément à l'Annexe IX de la Directive 93/42 et à l'Annexe VIII du Règlement 745/2017).
- Entreprise certifiée ISO 13485 et ISO 9001.
- Licence de Fonctionnement Fabricant Produits Médicaux n° : 3689-PS.

