

# Protector Ocular con Sujeción Trasera

## INDICACIONES

El **Protector Ocular con Sujeción Trasera** es un producto sanitario que se emplea como protector ocular pediátrico, indicado en fototerapia.

## COMPOSICIÓN

Producto con material tricapa, interior de algodón, exterior de poliamida y con relleno de espuma de poliuretano.



## MODO DE EMPLEO

- Colocar el Protector alrededor de los ojos del paciente, envolviendo la cabeza.
- Sujetar el Protector mediante el sistema velcro.

## CARACTERÍSTICAS

Se ha diseñado siguiendo un modelo anatómico para garantizar una correcta posición del protector ante movimientos bruscos.

Las longitudes del producto son ajustables mediante la combinación del sistema velcro y el material de la capa exterior.

El producto es transpirable, no irrita, antialérgico.

El sistema de fijación velcro permite una sujeción efectiva y eficaz.

## ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

El uso por más de un paciente puede provocar una infección cruzada.

No utilizar el producto sobre piel lesionada.

No utilizar el producto si éste se encuentra contaminado, sucio o evidentemente deteriorado.

## ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL

Manténgase fuera de la luz del sol. Manténgase seco.

Caducidad: 5 años.

### MEDIDAS DE LA UNIDAD DE PRODUCTO

Para escoger correctamente la talla se debe tener en cuenta el perímetro craneal y la superficie ocular a proteger:



REFERENCIA	MODELO	PERÍMETRO CRANEAL	ANCHO MASCARA
1029200	MEDIANO	36 - 40 cm	4 cm
1029220	GRANDE	35 - 41 cm	6.5 cm
1029250	PEQUENO	28 - 35 cm	3.5 cm

PRESENTACIÓN			
REFERENCIA	UNIDADES CAJA	MEDIDAS CAJA (cm)	PESO CAJA (kg)
1029200	25 uds/caja	21x15x15	0.41
1029220	25 uds/caja	21x15x15	0.41
1029250	25 uds/caja	21x15x15	0.36

### CUMPLE CON:

- Directiva 93/42/CEE del Consejo, Directiva 2007/47/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Clase I, no estéril (de acuerdo a Anexo IX de la Directiva 93/42 y Anexo VIII del Reglamento 745/2017).
- Empresa certificada por ISO 13485 e ISO 9001.
- Licencia de Funcionamiento Fabricante Productos Sanitarios No.: 3689-PS.

