

Protecteur Oculaire avec Fixation Arrière

INDICATIONS

Le site **Protecteur Oculaire avec Fixation Arrière** est un dispositif médical utilisé comme protecteur oculaire pédiatrique, indiqué pour la photothérapie.

COMPOSITION

Produit avec un matériau à trois couches, intérieur en coton, extérieur en polyamide et rembourrage en mousse de polyuréthane.



MODE D'EMPLOI

- Placer le protecteur autour des yeux du patient, en l'enroulant autour de la tête.
- Fixer le protecteur à l'aide du système velcro.

CARACTÉRISTIQUES

Il a été conçu selon un modèle anatomique pour garantir une position correcte du protecteur en cas de mouvements brusques.

Les longueurs du produit sont réglables grâce à la combinaison du système velcro et du matériau de la couche extérieure.

Le produit est respirant, non irritant, antiallergique.

Le système de fixation velcro permet une fixation efficace et efficiente.

AVERTISSEMENTS ET RECOMMANDATIONS

L'utilisation par plus d'un patient peut entraîner une infection croisée.

Ne pas utiliser le produit sur une peau blessée.

Ne pas utiliser le produit s'il est contaminé, sale ou manifestement endommagé.

STOCKAGE ET DURÉE D'UTILISATION

Ne pas exposer à la lumière du soleil. Le garder au sec.

Expiration : 5 ans.

DIMENSIONS DE L'UNITÉ DE PRODUIT

Pour choisir la bonne taille, il faut tenir compte du périmètre crânien et de la surface oculaire à protéger :



RÉFÉRENCE	MODELE	PÉRIMÈTRE CRÂNIEN	LARGEUR MASQUE
1029200	MOYEN	36 - 40 cm	4 cm
1029220	GRAND	35 - 41 cm	6.5 cm
1029250	PETIT	28 - 35 cm	3.5 cm

PRÉSENTATION			
REFERENCE	UNITES BOITE	DIMENSIONS BOITE (cm)	POIDS BOITE (kg)
1029200	25 unités/boîte	21x15x15	0.41
1029220	25 unités/boîte	21x15x15	0.41
1029250	25 unités/boîte	21x15x15	0.36

CONFORME À :

- Directive 93/42/CEE du Conseil, Directive 2007/47/CE du Parlement européen et du Conseil et Règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil.
- Classe I, non stérile (conformément à l'Annexe IX de la Directive 93/42 et à l'Annexe VIII du Règlement 745/2017).
- Entreprise certifiée ISO 13485 et ISO 9001.
- Licence de Fonctionnement Fabricant Produits Médicaux n° : 3689-PS.

