

Recubrimiento Mesa Quirúrgica

Producto de Enfermería

INDICACIONES

El **Recubrimiento de Mesa Quirúrgica** se utiliza para la mayor comodidad del paciente durante cualquier operación quirúrgica gracias a su relleno que distribuye la presión. Otra función es la de absorber y retener la sangre o fluidos corporales del paciente para así obtener una mayor limpieza de la mesa quirúrgica o del paciente.

COMPOSICIÓN

Parte inferior: Polipropileno impermeable. Textura ligeramente antideslizante.

Relleno interior: Guata sintética siliconada de poliéster de gramaje superior; antialérgica y antimoho.

Parte superior: Tejido no tejido de viscosa transpirable.

Material exento de látex.

MODO DE EMPLEO

- Sacar el producto del envoltorio y desplegar el recubrimiento.
- Colocar el recubrimiento en la mesa. Asegurarse que la pare impermeable queda debajo.
- Desechar después de su uso.

CARACTERÍSTICAS

Ayuda a mantener la comodidad del paciente durante el transcurso de la operación gracias a su relleno de fibra siliconada que distribuye la presión.

Tejido en contacto con el paciente de tacto suave y transpirable.

Parte inferior fabricada con tejido impermeable para evitar que traspase la sangre o fluidos corporales a la mesa quirúrgica.

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

El uso por más de un paciente puede provocar una infección cruzada.


No utilizar el producto sobre piel lesionada.

No utilizar el producto si éste se encuentra contaminado, sucio o evidentemente deteriorado.

ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL

Manténgase fuera de la luz del sol. Manténgase seco.

Caducidad: 5 años.

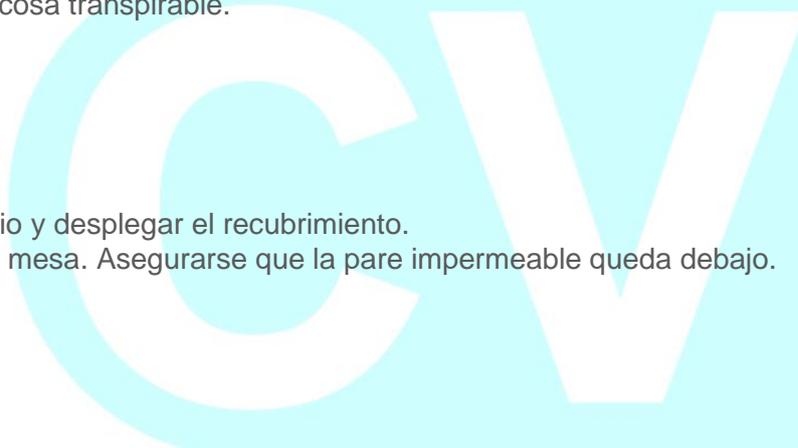

MEDIDAS DE LA UNIDAD DE PRODUCTO

REFERENCIA	MODELO	L (cm)	A (cm)
1040900	PEQUEÑO	66	23
1040910	MEDIANO	98	63
1040920	GRANDE	194	69

PRESENTACIÓN

REFERENCIA	UNIDADES CAJA	MEDIDAS CAJA (cm)	PESO CAJA (kg)*
1040900	30 uds/caja	40x26x47	4.2
1040910	10 uds/caja	60x40x40	5.8
1040920	10 uds/caja	76.5x62x46.5	11.3

TOLERANCIA DE PESO ±10%

CUMPLE CON:

- Directiva 93/42/CEE del Consejo, Directiva 2007/47/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Clase I, no estéril (de acuerdo a Anexo IX de la Directiva 93/42 y Anexo VIII del Reglamento 745/2017).
- Empresa certificada por la ISO 13485 e ISO 9001.
- Licencia de Funcionamiento Fabricante Productos Sanitarios No.: 3689-PS.



Sistema de Gestión
ISO 9001:2015
ISO 22716:2007
www.tuv.com
ID 9105078921