

Soporte Moldeable

Producto de Enfermería

INDICACIONES

El **Soporte moldeable** está indicado para inmovilizar y proteger las zonas de punción de los pacientes. Utilizado en reanimación, urgencias, UCI...

Sujeta los elementos de terapia intravenosa e intraarterial a la extremidad del paciente evitando así que cualquier movimiento brusco pueda desplazarlos y arrancarlos.

Dispositivo no adecuado para pacientes agitados o agresivos ni para pacientes con traumatismos en la zona a aplicar el soporte.



COMPOSICIÓN

Base soporte: Aluminio 100%

Recubrimiento del soporte: Relleno interior de espuma de poliuretano con una capa de velours de color marfil.

Tiras: Velours y TNT Poliéster 100%

MODO DE EMPLEO

- Colocar el soporte en el miembro doblándolo hasta que se adapte a él.
- Ajustarlo pasando las cintas alrededor del miembro y sujetándolo con el cierre velcro.

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS	VENTAJAS	BENEFICIOS
Flexible y ligero	Asegura una perfecta adaptación a la extremidad	Se coloca directamente en el antebrazo resultando seguro y confortable para el paciente
Material transpirable	No irrita la piel, antialérgico. Permite la respiración de la piel, suprime el recalentamiento, humedad, maceración y evita la compresión	Suavidad y comodidad para el paciente
Cierre con velcro	Ajustable y seguro	Flexibilidad en el ajuste. Seguridad en la sujeción
Lavable	Se puede reutilizar en el mismo paciente, no se puede reutilizar para otro paciente. Si el producto no está contaminado de agentes infecciosos se puede limpiar con agua y jabón neutro	Elimina el riesgo de contaminación cruzada
Práctico	Fácil y rápido de aplicar. El cierre velcro agiliza la acción de poner y quitar el soporte	Ahorra tiempo al personal de enfermería
Atraumático	Bordes redondeados	No causa daño ni inflige lesiones

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

El uso por más de un paciente puede provocar una infección cruzada.
 No utilizar el producto sobre piel lesionada.
 No utilizar el producto si éste se encuentra contaminado, sucio o evidentemente deteriorado.

ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL

Manténgase fuera de la luz del sol. Manténgase seco.
 Caducidad: 5 años.

MEDIDAS DE LA UNIDAD DE PRODUCTO

REFERENCIA	MODELO	L (cm)	A (cm)
1060100	EXTRA PEQUEÑO	10	4
1060120	PEQUEÑO	16	6
1060125	MEDIANO	21	7
1060130	GRANDE	26	8

PRESENTACIÓN			
REFERENCIA	UNIDADES CAJA	MEDIDAS CAJA (cm)	PESO CAJA (kg)*
1060100	30 Uds./caja	20x15x15	0.44
1060120	30 Uds./caja	20x15x15	0.913
1060125	30 Uds./caja	31x21x23	1.6
1060130	30 Uds./caja	31x21x23	2.25

TOLERANCIA DE PESO ±10%

CUMPLE CON:

- Directiva 93/42/CEE del Consejo, Directiva 2007/47/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Clase I, no estéril (de acuerdo a Anexo IX de la Directiva 93/42 y Anexo VIII del Reglamento 745/2017).
- Empresa certificada por la ISO 13485 e ISO 9001.
- Licencia de Funcionamiento Fabricante Productos Sanitarios No.: 3689-PS.

