

# Ceinture de Soutien Abdominal

## Produit d'Infirmérie

### INDICATIONS

La **Ceinture de Soutien Abdominal** est conçue comme une alternative au gilet de soutien traditionnel pour les patients alités, en fauteuil roulant ou autre fauteuil gériatrique.

Dispositif destiné exclusivement au positionnement abdominal. Ne pas appliquer sur d'autres parties du corps.

Indiqué pour maintenir le patient assis dans le fauteuil et prévenir d'éventuelles chutes ou glissades.



### COMPOSITION

Couche interne-externe : 100 % polyamide  
Rembourrage : 100 % mousse de polyuréthane  
Bandes : 100 % coton

### MODE D'EMPLOI

- Placer la ceinture sur la partie abdominale du patient. Le grand modèle intègre un système velcro qui permet de fixer la ceinture abdominale dans la zone lombaire du patient.
- Croiser les sangles dans la zone lombaire.
- Amener les sangles jusqu'à la partie abdominale, les passer dans les anneaux latéraux respectifs et faire un nœud de sécurité. Remettre les bandes à l'arrière.
- Faire un nœud au dossier de la chaise ou à la structure du lit.

### CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES	AVANTAGES	BÉNÉFICES
Conception en forme de V des bandes	Permet d'étirer davantage à partir du bas et du haut du produit que du centre	Conserve sa forme sans besoin d'anneaux gênants
Bandes extra fortes	Confère au produit force et durabilité	Augmente la sécurité
Fabriqué en tissu spécial	Matériau respirant qui peut être facilement lavé.	Frais et confortable
Rembourrage en mousse	Incorpore un coussin frais et respirant	Confort pour le patient
Bandes	Extra longues pour atteindre la structure de nouage	Flexibilité dans l'application
Produit entièrement cousu	Fournit de la force au produit, assure sa durabilité et n'incorpore pas de pièces mobiles	Augmente la sécurité
Conception large	Incorpore un soutien naturel sans contraindre	Composition efficace et confort du patient.

**AVERTISSEMENTS ET RECOMMANDATIONS**

L'utilisation par plus d'un patient peut entraîner une infection croisée.  
 Ne pas utiliser le produit sur une peau blessée.  
 Ne pas utiliser le produit s'il est contaminé, sale ou manifestement endommagé.

**STOCKAGE ET DURÉE D'UTILISATION**

Ne pas exposer à la lumière du soleil. Le garder au sec.  
 Expiration : 5 ans.

**DIMENSIONS DE L'UNITÉ DE PRODUIT**

RÉFÉRENCE	MODÈLE	L (cm)	H (cm)	L BANDE (cm)
1070100	MOYEN	70	17	147
1070150	GRAND	115	17	167

**PRÉSENTATION**

RÉFÉRENCE	UNITÉS BOÎTE	DIMENSIONS BOÎTE (cm)	POIDS BOÎTE (kg)*
1070100	12 unités/boîte	31x21x23	1.35
1070150	12 unités/boîte	31x21x23	1.82

TOLÉRANCE DE POIDS ±10 %

**CONFORME À :**

- Directive 93/42/CEE du Conseil, Directive 2007/47/CE du Parlement européen et du Conseil et Règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil.
- Classe I, non stérile (conformément à l'Annexe IX de la Directive 93/42 et à l'Annexe VIII du Règlement 745/2017).
- Entreprise certifiée ISO 13485 et ISO 9001.
- Licence de Fonctionnement Fabricant Produits Médicaux n° : 3689-PS.

