

# Sangle de Fixation pour Table d'Opération

## Produit d'Infirmierie

### INDICATIONS

La **Sangle de Fixation pour Table d'Opération** est conçue pour fixer les membres et/ou le tronc du patient sur la table d'opération.

Dispositif destiné exclusivement aux extrémités ou à la zone abdominale selon la référence. Ne pas appliquer sur d'autres parties du corps.

Indiquée pour maintenir les bras ou les jambes dans une position statique afin d'éviter les mouvements brusques du patient au moment de l'opération.



### COMPOSITION

Couche interne-externe : 100 % polyester

Anneau : 100 % nylon

### MODE D'EMPLOI

- Déployez la ceinture sur le patient. Passer l'extrémité à l'intérieur de la boucle.
- Ajuster la ceinture à la partie du corps à retenir.
- Fermer à l'aide de la fixation velcro incluse.

### CARACTÉRISTIQUES

Matériau respirant qui peut être facilement lavé. Tissu frais et confortable.

La longueur est ajustable au diamètre de chaque patient grâce au système velcro, permettant une fixation effective et efficace. Soutien naturel sans contraindre.

Sangles extra-fortes pour une sécurité accrue pendant le processus chirurgical.

### AVERTISSEMENTS ET RECOMMANDATIONS

L'utilisation par plus d'un patient peut entraîner une infection croisée.

Ne pas utiliser le produit sur une peau blessée.

Ne pas utiliser le produit s'il est contaminé, sale ou manifestement endommagé.

### STOCKAGE ET DURÉE D'UTILISATION

Ne pas exposer à la lumière du soleil. Le garder au sec.

Expiration : 5 ans.

**DIMENSIONS DE L'UNITÉ DE PRODUIT**

RÉFÉRENCE	MODÈLE	L (cm)	H (cm)
1070500	BRAS / JAMBE	80	8
1070550	TABLE D'OPÉRATIO N	150	6
1070560	TABLE D'OPÉRATIO N	230	6

**PRÉSENTATION**

RÉFÉRENCE	UNITÉS BOÎTE	DIMENSIONS BOÎTE (cm)	POIDS BOÎTE (kg)*
1070500	20 unités/boîte	21x15x15	0.56
1070550	20 unités/boîte	21x15x15	0.56
1070560	20 unités/boîte	21x15x15	0.56

TOLÉRANCE DE POIDS ±10 %

**CONFORME À :**

- Directive 93/42/CEE du Conseil, Directive 2007/47/CE du Parlement européen et du Conseil et Règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil.
- Classe I, non stérile (conformément à l'Annexe IX de la Directive 93/42 et à l'Annexe VIII du Règlement 745/2017).
- Entreprise certifiée ISO 13485 et ISO 9001.
- Licence de Fonctionnement Fabricant Produits Médicaux n° : 3689-PS.

