

Cinta de Sujeción a Mesa Quirúrgica

Producto de Enfermería

INDICACIONES

La **Cinta de Sujeción a Mesa Quirúrgica** está diseñada para la sujeción de las extremidades y/o tronco del paciente a la mesa de operaciones.

Dispositivo destinado exclusivamente para extremidades o zona abdominal según referencia. No aplicar en ninguna otra parte del cuerpo.

Indicado para mantener los brazos o piernas en una posición estática para evitar movimientos bruscos del paciente en el momento de la operación.



COMPOSICIÓN

Capa interior-exterior: Poliéster 100%

Anilla: Nylon 100%

MODO DE EMPLEO

- Desplegar el cinturón sobre el paciente. Pasar el extremo por la parte interior de la hebilla.
- Ajustar el cinturón a la parte del cuerpo que se desea sujetar.
- Cerrar mediante la fijación velcro que incorpora.

CARACTERÍSTICAS

Material transpirable que se puede lavar fácilmente. Tejido fresco y confortable.

La longitud al diámetro de cada paciente es ajustable mediante la combinación del sistema velcro, permitiendo una sujeción efectiva y eficaz. Soporte natural sin estrechar.

Cintas extrafuertes para incrementar la seguridad durante el proceso quirúrgico.

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

El uso por más de un paciente puede provocar una infección cruzada.

No utilizar el producto sobre piel lesionada.

No utilizar el producto si éste se encuentra contaminado, sucio o evidentemente deteriorado.

ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL

Manténgase fuera de la luz del sol. Manténgase seco.

Caducidad: 5 años.

MEDIDAS DE LA UNIDAD DE PRODUCTO

REFERENCIA	MODELO	L (cm)	A (cm)
1070500	ESTÁNDAR (EXTREMIDADES)	80	8
1070550	PEQUEÑA (ABDOMINAL)	150	6
1070560	GRANDE (ABDOMINAL)	230	6

PRESENTACIÓN

REFERENCIA	UNIDADES CAJA	MEDIDAS CAJA (cm)	PESO CAJA (kg)*
1070500	20 uds/caja	21x15x15	0.56
1070550	20 uds/caja	21x15x15	0.56
1070560	20 uds/caja	21x15x15	0.56

TOLERANCIA DE PESO ±10%

CUMPLE CON:

- Directiva 93/42/CEE del Consejo, Directiva 2007/47/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Clase I, no estéril (de acuerdo a Anexo IX de la Directiva 93/42 y Anexo VIII del Reglamento 745/2017).
- Empresa certificada por la ISO 13485 e ISO 9001.
- Licencia de Funcionamiento Fabricante Productos Sanitarios No.: 3689-PS.



Sistema de Gestión
ISO 9001:2015
ISO 22716:2007
www.tuv.com
ID: 9106078921