

Protector Codo-Talón

INDICACIONES

Protector Codo-Talón es un producto sanitario que se emplea en la prevención de la aparición de escaras en pacientes que han de permanecer largo tiempo en cama o silla. Adicionalmente puede emplearse como sujeción del apósito.



COMPOSICIÓN

Producto compuesto por poliéster a nivel de la capa externa y del interior, así como del relleno. Las tiras de sujeción son de poliamida.

MODO DE EMPLEO

- Desplegar el protector codo-talón.
- Colocar el protector en la base del codo o talón de manera que el punto de presión de los mismos coincida con el refuerzo interior.
- Ajustar la cinta o cintas mediante el cierre de velcro que incorporan

CARACTERÍSTICAS GENERALES

CARACTERÍSTICAS	VENTAJAS	BENEFICIOS
Diseño Anatómico	Asegura una perfecta adaptación tanto al codo como al talón. Impide al protector girar o desplazarse.	Se coloca directamente debajo del punto de presión del codo/talón, resultando muy confortable para el paciente. Permite reducir costes en uso e inventario.
Cojín de tres capas	Presenta una pequeña elevación para el punto de presión del codo/talón.	Suavidad y comodidad para el paciente.
Cierre con sistema velcro	Ajustable. Seguro.	Flexibilidad en el ajuste. Seguridad en la sujeción.
Uso individual	Terapia individualizada.	Elimina el riesgo de contaminación cruzada.
Cinta amplia	Ajuste de la protección al paciente, evitando la rotación.	Suave y ligera. Comodidad y Seguridad.
Usabilidad	Fácil de aplicar, escaso mantenimiento.	Ahorro de tiempo al personal de enfermería y cuidados.

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

REFERENCIA	CARACTERÍSTICA
1080210	Zona de refuerzo interior en la zona del codo o talón
1080210B	Extensión con cinta para doble sujeción y máxima zona de protección.

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

El uso por más de un paciente puede provocar una infección cruzada.
 No utilizar el producto sobre piel lesionada.
 No utilizar el producto si éste se encuentra contaminado, sucio o evidentemente deteriorado.

ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL

Manténgase fuera de la luz del sol. Manténgase seco.
 Caducidad: 5 años.

MEDIDAS DE LA UNIDAD DE PRODUCTO

REFERENCIA	MODELO	Largo	Ancho	Largo – Cinta	Ancho - Cinta	Superf. Refuerzo
1080200	Estándar	21 cm	27 cm	28 cm	5 cm	-
1080210	Reforzado	21 cm	27 cm	28 cm	5 cm	18 x 15 cm
1080210B	Doble sujeción	21 cm	27 cm	28 cm	5 cm	18 x 15 cm

PRESENTACIÓN			
REFERENCIA	UNIDADES CAJA	MEDIDAS CAJA (cm)	PESO CAJA (kg)
1080200	36 uds/caja	31 x 21 x 31	1.2
1080210		31 x 21 x 31	1.43
1080210B		38 x 21 x 35	1.75

CUMPLE CON:

- Directiva 93/42/CEE del Consejo, Directiva 2007/47/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Clase I, no estéril (de acuerdo a Anexo IX de la Directiva 93/42 y Anexo VIII del Reglamento 745/2017).
- Empresa certificada por la ISO 13485 e ISO 9001.
- Licencia de Funcionamiento Fabricante Productos Sanitarios No.: 3689-PS.

