

Protège Coude-Talon Ouvert

INDICATIONS



Le **Protège Coude-Talon Ouvert** est un dispositif médical utilisé pour prévenir les escarres chez les patients qui doivent rester alités ou dans un fauteuil pendant une longue période. Il peut également être utilisé pour soutenir le pansement.

COMPOSITION

Produit en polyester au niveau de la couche extérieure et intérieure, ainsi que du rembourrage. Les sangles de fixation sont en polyamide.

MODE D'EMPLOI

- Déplier le protecteur coude-talon.
- Placer le protecteur à la base du coude ou du talon de façon à ce que son point de pression coïncide avec le renfort intérieur.
- Ajuster la ou les bandes à l'aide de la fermeture velcro.

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES	AVANTAGES	BÉNÉFICES
Conception anatomique	Assure un ajustement parfait au niveau du coude et du talon. Empêche le protecteur de tourner ou de se déplacer.	Il est placé directement sous le point de pression du coude/talon, ce qui le rend très confortable pour le patient. Il permet de réduire les coûts d'utilisation et d'inventaire.
Coussin à trois couches	Possède une petite élévation pour le point de pression du coude/talon.	Douceur et confort pour le patient.
Fermeture avec système velcro	Réglable. Sûr.	Flexibilité dans le réglage. Sécurité dans la fixation.
Utilisation individuelle	Thérapie individualisée.	Élimine le risque de contamination croisée.
Bande large	Ajustement de la protection au patient, en évitant la rotation.	Doux et léger. Confort et sécurité.
Utilisabilité	Facile à appliquer, peu d'entretien.	Gain de temps pour le personnel infirmier et soignant.

AVERTISSEMENTS ET RECOMMANDATIONS

L'utilisation par plus d'un patient peut entraîner une infection croisée.
 Ne pas utiliser le produit sur une peau blessée.
 Ne pas utiliser le produit s'il est contaminé, sale ou manifestement endommagé.

STOCKAGE ET DURÉE D'UTILISATION

Ne pas exposer à la lumière du soleil. Le garder au sec.
 Expiration : 5 ans.

DIMENSIONS DE L'UNITÉ DE PRODUIT

RÉFÉRENCE	MODÈLE	Longueur	Largeur	Longueur - Bande	Largeur - Bande
1080280	Longueur	43 cm	23 cm	28 cm	11 cm
1080290	Court	28 cm	23 cm	25 cm	4 cm

TOLÉRANCE DES DIMENSIONS : $\pm 5\%$

PRÉSENTATION			
RÉFÉRENCE	UNITÉS BOÎTE	DIMENSIONS BOÎTE (cm)	POIDS BOÎTE (kg)*
1080280	20 unités/boîte	40x25x40	1.93
1080290	40 unités/boîte	38x21x35	1.5

*TOLÉRANCE : $\pm 0.5\%$

CONFORME À :

- Directive 93/42/CEE du Conseil, Directive 2007/47/CE du Parlement européen et du Conseil et Règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil.
- Classe I, non stérile (conformément à l'Annexe IX de la Directive 93/42 et à l'Annexe VIII du Règlement 745/2017).
- Entreprise certifiée ISO 13485 et ISO 9001.
- Licence de Fonctionnement Fabricant Produits Médicaux n° : 3689-PS.

