

## Immobilisateur de Membres à Ouverture Rapide

### INDICATIONS

L'**Immobilisateur de Membres à Ouverture Rapide** est un dispositif médical qui est utilisé comme immobilisateur de membres, pour une utilisation dans les lits et là où une prise ferme et sûre est nécessaire, pour éviter les mouvements brusques. Équipé d'un coussin souple avec de longues bandes de soutien.




### COMPOSITION

Produit avec intérieur en polyamide, extérieur en polystyrène et rembourrage en mousse de polyuréthane, avec bandes en polyester double face.

### MODE D'EMPLOI

- Déplier l'immobilisateur et le placer autour du poignet ou de la cheville.
- Ajuster l'immobilisateur à l'aide du système velcro au diamètre souhaité.
- Attacher la sangle, la fixer et la nouer à la structure, de préférence métallique, du lit ou similaire, de sorte que l'immobilisateur soit tendu.

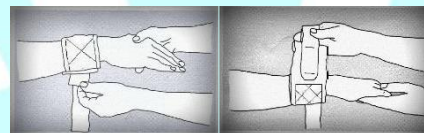

### CARACTÉRISTIQUES

Douceur et confort grâce à un rembourrage plus épais. Haute résistance, permettant la circulation. Respirant, il empêche l'irritation de la peau, la surchauffe, l'humidité et la macération.

### AVERTISSEMENTS ET RECOMMANDATIONS

L'utilisation par plus d'un patient peut entraîner une infection croisée.

Ne pas utiliser le produit sur une peau blessée.

Ne pas utiliser le produit s'il est contaminé, sale ou manifestement endommagé.

### STOCKAGE ET DURÉE D'UTILISATION

Ne pas exposer à la lumière du soleil. Le garder au sec.

Expiration : 5 ans.

**DIMENSIONS DE L'UNITÉ DE PRODUIT**

Conception anatomique, adaptable au patient. Il peut être utilisé indistinctement sur le poignet ou la cheville :

RÉFÉRENCE	LONGUEUR (cm)	LARGEUR (cm)
1090110	168	7.5

PRÉSENTATION			
RÉFÉRENCE	UNITÉS BOÎTE	DIMENSIONS BOÎTE (cm)	POIDS BOÎTE (kg)
1090110	60 unités/boîte	31*21*31	1.68

**CONFORME À :**

- Directive 93/42/CEE du Conseil, Directive 2007/47/CE du Parlement européen et du Conseil et Règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil.
- Classe I, non stérile (conformément à l'annexe IX de la Directive 93/42 et à l'Annexe VIII du Règlement 745/2017).
- Entreprise certifiée ISO 13485 et ISO 9001.
- Licence de Fonctionnement Fabricant Produits Médicaux n° : 3689-PS.

