

Inmovilizador de Extremidades de Apertura Rápida

INDICACIONES

Inmovilizador de Extremidades de Apertura Rápida es un producto sanitario que se emplea como inmovilizador de extremidades, para usar en las camas y donde se requiera una sujeción mediana y segura, evitando movimientos bruscos. Dotado de una almohadilla suave con largas bandas de sujeción.




COMPOSICIÓN

Producto con interior de poliamida, exterior de poliestireno y con relleno de espuma de poliuretano, con cintas a doble cara de poliéster.

MODO DE EMPLEO

- Desplegar el inmovilizador y colocarlo alrededor de la muñeca o tobillo.
- Ajustar el inmovilizador mediante el sistema velcro al diámetro deseado.
- Asegurar la cinta, fijarla y anudarla a la estructura, preferiblemente metálica, de la cama o similar, de forma que el inmovilizador quede tensado.

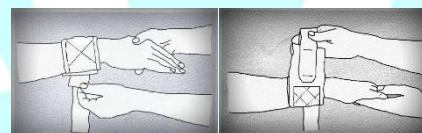

CARACTERÍSTICAS

Suavidad y comodidad gracias al almohadillado de mayor grosor. Elevada resistencia, permitiendo la circulación. Transpirable, evita irritaciones en la piel, el recalentamiento, la humedad y la maceración.

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

El uso por más de un paciente puede provocar una infección cruzada.

No utilizar el producto sobre piel lesionada.

No utilizar el producto si éste se encuentra contaminado, sucio o evidentemente deteriorado.

ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL

Manténgase fuera de la luz del sol. Manténgase seco.

Caducidad: 5 años.

MEDIDAS DE LA UNIDAD DE PRODUCTO

Diseño anatómico, adaptable al paciente. Se puede utilizar indistintamente en la muñeca o tobillo:

REFERENCIA	LONGITUD (cm)	ANCHO (cm)
1090110	168	7.5

PRESENTACIÓN			
REFERENCIA	UNIDADES CAJA	MEDIDAS CAJA (cm)	PESO CAJA (kg)
1090110	60 uds/caja	31*21*31	1.68

CUMPLE CON:

- Directiva 93/42/CEE del Consejo, Directiva 2007/47/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Clase I, no estéril (de acuerdo a Anexo IX de la Directiva 93/42 y Anexo VIII del Reglamento 745/2017).
- Empresa certificada por la ISO 13485 e ISO 9001.
- Licencia de Funcionamiento Fabricante Productos Sanitarios No.: 3689-PS.

