

## Immobilisateur de Membres Pédiatrique et Néonatal

### INDICATIONS

L'**Immobilisateur de Membres Pédiatrique et Néonatal** est un dispositif médical qui est utilisé comme immobilisateur de membres pour les patients néonataux lorsqu'un support moyen et sûr est nécessaire.

Équipé d'un coussin souple avec de longues bandes de soutien.




### COMPOSITION

Produit fabriqué en matériau à trois couches, avec intérieur en coton, extérieur en polyamide et rembourrage en mousse de polyuréthane, avec des bandes en polyester.

### MODE D'EMPLOI

- Ajuster l'immobilisateur et le placer autour du poignet ou de la cheville.
- Ajuster l'immobilisateur au moyen du système velcro et attacher les sangles à la structure, de préférence métallique, du lit ou similaire, de manière à ce que l'immobilisateur reste tendu.

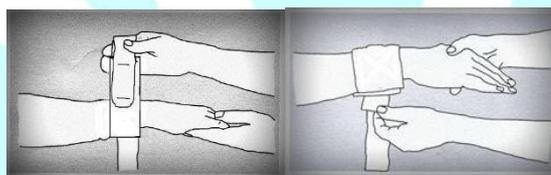

### CARACTÉRISTIQUES

Douceur. Haute résistance, permettant la circulation. Respirant, il empêche l'irritation de la peau, la surchauffe, l'humidité et la macération.

### AVERTISSEMENTS ET RECOMMANDATIONS

L'utilisation par plus d'un patient peut entraîner une infection croisée.

Ne pas utiliser le produit sur une peau blessée.

Ne pas utiliser le produit s'il est contaminé, sale ou manifestement endommagé.

### STOCKAGE ET DURÉE D'UTILISATION

Ne pas exposer à la lumière du soleil. Le garder au sec.

Expiration : 5 ans.

**DIMENSIONS DE L'UNITÉ DE PRODUIT**

Conception anatomique, adaptable au patient. Il peut être utilisé indistinctement sur le poignet ou la cheville :

RÉFÉRENCE	LONGUEUR (cm)	LARGEUR (cm)
1090150	168	3

PRÉSENTATION			
RÉFÉRENCE	UNITÉS BOÎTE	DIMENSIONS BOÎTE (cm)	POIDS BOÎTE (kg)
1090150	120 unités/boîte	30*22*15	1.15

**CONFORME À :**

- Directive 93/42/CEE du Conseil, Directive 2007/47/CE du Parlement européen et du Conseil et Règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil.
- Classe I, non stérile (conformément à l'annexe IX de la Directive 93/42 et à l'Annexe VIII du Règlement 745/2017).
- Entreprise certifiée ISO 13485 et ISO 9001.
- Licence de Fonctionnement Fabricant Produits Médicaux n° : 3689-PS.

