

# Inmovilizador con Protección de Mano

## INDICACIONES

El **Inmovilizador con Protección de Mano** es un producto sanitario que está indicado para pacientes sometidos a cirugía de las manos, en reanimación y siempre que se requiera una fuerte sujeción de las manos aportando un elevado índice de confort y seguridad para el paciente.

## COMPOSICIÓN

Producto compuesto por malla de poliéster, con tiras de velours velcro y sistema velcro. Dispone de relleno de poliéster y de material tricapa en base poliamida, poliéster y algodón. Anilla de polipropileno.



## MODO DE EMPLEO

- Colocar el guante en la mano del paciente, asegurándose que los dedos estén separados y colocados en los espacios adecuados. La malla debe cubrir toda la mano.
- Aplicar una correcta medida con la cinta de velcro, de manera que los dedos queden sujetos.
- Colocar la cinta de sujeción, con la protección suave de la cinta de espuma, encima de la muñeca.
- Cierre el velcro encima de la muñeca.
- Envuelva el inmovilizador con la cinta y apriételo suavemente.
- Fije la cinta a una estructura rígida.

## CARACTERÍSTICAS

Dotado de un envoltorio acolchado que se adapta a la forma de la palma de la mano. Transpirable.

## ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

El uso por más de un paciente puede provocar una infección cruzada.

No utilizar el producto sobre piel lesionada.

No utilizar el producto si éste se encuentra contaminado, sucio o evidentemente deteriorado.

## ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL

Manténgase fuera de la luz del sol. Manténgase seco.

Caducidad: 5 años.

### MEDIDAS DE LA UNIDAD DE PRODUCTO


REFERENCIA	LONGITUD (cm)	ANCHO (cm)	LONGITUD CINTA (cm)
1090300	25	17	168

PRESENTACIÓN			
REFERENCIA	UNIDADES CAJA	MEDIDAS CAJA (cm)	PESO CAJA (kg)*
1090300	16 uds/caja	38x21x35	2.23

TOLERANCIA: ± 0.5 kg

### CUMPLE CON:

- Directiva 93/42/CEE del Consejo, Directiva 2007/47/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Clase I, no estéril (de acuerdo a Anexo IX de la Directiva 93/42 y Anexo VIII del Reglamento 745/2017).
- Empresa certificada por la ISO 13485 e ISO 9001.
- Licencia de Funcionamiento Fabricante Productos Sanitarios No.: 3689-PS.

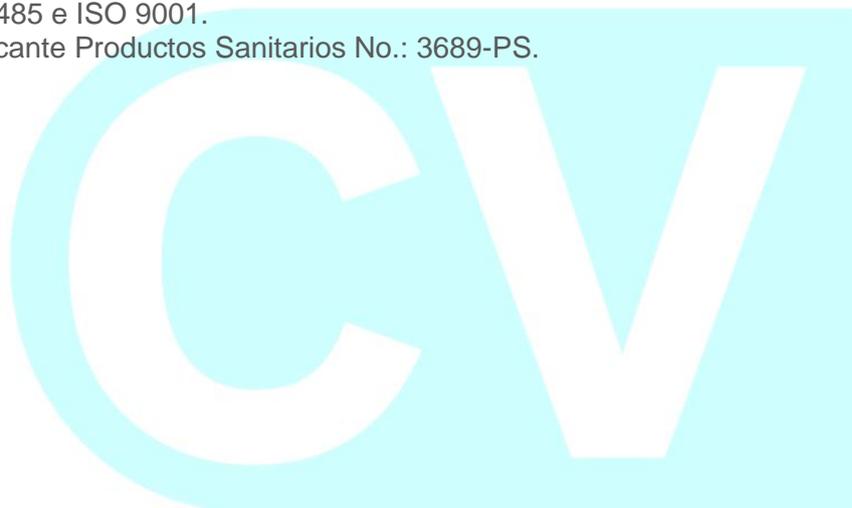

Sistema de Gestión  
ISO 9001:2015  
ISO 22716:2007

www.tuv.com  
ID 9105078921