

DISPOSCRUB SPONGE C

ÉPONGE au digluconate de chlorhexidine pour le lavage et l'antiseptie de la peau

DESCRIPTION

Éponge pour l'antiseptie préopératoire du patient. Pour une peau saine uniquement. Dimensions standard pour le nettoyage complet du corps. Respecte la peau. Risque minimal d'irritation et d'abrasion, ce qui réduit le risque d'infection. Non réutilisable.

COMPOSITION

ÉPONGE : 100 % mousse de polyuréthane
 ANTISEPTIQUE : Digluconate de chlorhexidine 4 % (20 g de solution chlorhexidine digluconate 20 %), Excipients q.s.p. 100 g 20 ml environ.

MODE D'EMPLOI

Laver la peau avec de l'eau, retirer l'éponge de l'emballage en utilisant l'ouverture facile située à une extrémité. Une fois que l'éponge a été retirée de l'emballage, jeter l'emballage. Appliquer l'antiseptique pendant 1 minute comme sous une douche normale, puis Rincer et sécher avec des serviettes jetables ou de l'air chaud.



AVERTISSEMENTS

Pour un usage externe uniquement. Ne pas avaler. Irritant pour les yeux. Éviter tout contact avec les yeux, les muqueuses et les zones cutanées sensibles ou malades. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau. Ne pas utiliser sur des personnes sensibles à ses composants, ni sur des zones étendues de la peau, ni pendant une période prolongée. Tenir hors de portée des enfants et loin de la nourriture et des boissons. Afin d'éviter les risques pour les personnes et l'environnement, suivre les instructions d'utilisation. Ne pas utiliser avec des détergents anioniques. EN CAS D'INTOXICATION OU D'INGESTION ACCIDENTELLE, appeler le Service Médical d'Information Toxicologique, Tél. : 91 562 04 20. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'étiquette ou le récipient.

CARACTÉRISTIQUES

Éponge de densité appropriée pour donner au produit un toucher doux. Dimensions standard pour le nettoyage du corps.

PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES

Aspect : liquide Couleur : rose Densité : 1.02 ± 0.025 g/ml

DIMENSIONS DU PRODUIT UNITAIRE

100 x 100 x 25 mm ± 2.5 mm

STOCKAGE

Conserver dans un endroit frais et sec. Protéger de la lumière du soleil. Conserver à des températures comprises entre 5 et 30 °C.

PRÉSENTATION				
RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	UNITÉ/BOÎTE	DIMENSIONS BOÎTE (cm)	POIDS BOÎTE** (kg)
0030330	DISPOSCRUB SPONGE C	120	40x26x47	4.1
0030330E	DISPOMEDIC SPONGE C PLUS 15 distributeurs de 24 unités	360	60x39.5x50.5	11.2

** TOLERANCES : Poids ± 0.5 Kg

CONFORME À :

Règlement (UE) 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la commercialisation et l'utilisation des produits biocides.

EN 13624:2014 Antiseptiques et désinfectants chimiques. Test quantitatif de suspension pour l'évaluation de l'activité fongicide ou lévuricide en médecine. Méthode d'essai et exigences (phase 2, étape 1).

EN 13727:2012 Antiseptiques et désinfectants chimiques. Test quantitatif de suspension pour l'évaluation de l'activité bactéricide dans le domaine médical. Méthode d'essai et exigences (phase 2, étape 1).

EN 12791:2005 Antiseptiques et désinfectants chimiques. Désinfection chirurgicale des mains. Exigences et méthodes d'essai (phase 2/étape 2).

EN 1499:1997 Antiseptiques et désinfectants chimiques. Lavage hygiénique des mains. Méthode d'essai et exigences (phase 2/étape 2).

ISO 9001:2015 Entreprise certifiée.

Nº REG. AEMPS : 833-DES

