

Cojines Antiescaras

Producto de Enfermería

INDICACIONES

Los **Cojines Antiescaras** es un producto sanitario que se emplea para la prevención de escaras de los pacientes que han de permanecer largo tiempo en silla.

COMPOSICIÓN

El cojín está compuesto por un relleno de fibra de poliéster hueca siliconada. La parte superior es de piel sintética y la parte inferior de algodón 100% ignífugo.

MODO DE EMPLEO

- Extraer el cojín de la bolsa y asirlo siempre por un lateral.
- Colocar el cojín en la zona de asiento de la silla.

CARACTERÍSTICAS

El relleno de fibra de poliéster siliconada permite una recuperación y reacción inmediata a cualquier presión aplicada, consiguiendo una óptima repartición del peso.

Su peso reducido hace muy manejable su uso y traslado.

El conjunto de fibras proporciona una ventilación constante, evitando la acumulación y absorción de humedad.

La parte central hueca permite transpiración e impide la presión en la parte afectada cuando el paciente debe permanecer sentado.

Lavar a mano con agua fría y productos no abrasivos. Después del lavado dejar secar en posición horizontal.



ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

El uso por más de un paciente puede provocar una infección cruzada.

No utilizar el producto sobre piel lesionada.

No utilizar el producto si éste se encuentra contaminado, sucio o evidentemente deteriorado.

ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL

Manténgase fuera de la luz del sol. Manténgase seco.

Caducidad: 5 años.

MEDIDAS DE LA UNIDAD DE PRODUCTO

REFERENCIA	MODELO	L (cm)	A (cm)	DIÁMETRO (cm)
5010000	CUADRADO	44	44	-
5010001	HERRADURA	44	44	-
5010002	CUADRADO CON ORIFICIO	44	44	-
5010003	ANILLO	-	-	49.5

PRESENTACIÓN

REFERENCIA	UNIDADES BOLSA	MEDIDAS CAJA (cm)	PESO CAJA (kg)
5010000	1 uds/bolsa	52x52x12	0.8
5010001	1 uds/bolsa	52x52x12	0.6
5010002	1 uds/bolsa	52x52x12	0.6
5010003	1 uds/bolsa	52x52x12	0.6

TOLERANCIA DE PESO ±10%

CUMPLE CON:

- Directiva 93/42/CEE del Consejo, Directiva 2007/47/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Clase I, no estéril (de acuerdo a Anexo IX de la Directiva 93/42 y Anexo VIII del Reglamento 745/2017).
- Empresa certificada por la ISO 13485 e ISO 9001.
- Licencia de Funcionamiento Fabricante Productos Sanitarios No.: 3689-PS.

