

Llave de 3 vías

Apta para lípidos

INDICACIONES

Llave de 3 vías es un producto sanitario esterilizado con óxido de etileno y de fácil visualización para poder ser identificado sin necesidad de apertura.

Tres vías de paso con dos conexiones luer-lock hembra y una macho. Con tapón protector.

El producto es apto para lípidos, citostáticos, antisépticos y otros medicamentos de alto poder cáustico.



COMPOSICIÓN

Cuerpo de policarbonato totalmente transparente. Exento de látex, PVC y apirógeno.

MODO DE EMPLEO

Uso recomendado para la infusión y administración intermitente de medicamentos por vía intravenosa.

- Revisar con atención la integridad del envase del producto, así como la fecha de caducidad para comprobar el buen estado de este. Retirar la llave de tres vías del envase.
- Separar cuidadosamente los tapones protectores.
- Utilizar el producto inmediatamente después de abrir el blíster individual.
- Conectar con el terminal correspondiente el conector de la alargadera o de otro dispositivo compatible.
- Hacer que el líquido fluya y se desplace el aire del tubo.
- Limpiar el sitio de inyección y conectar con el paciente.

CARACTERÍSTICAS

Esterilizado con gas óxido de etileno, conforme ISO 11135.

Compatible con sangre y hemoderivados.

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

Un solo uso.

El uso por más de un paciente puede provocar una infección cruzada.

No utilizar si el embalaje está abierto o los protectores están desacoplados.

No utilizar el producto si éste se encuentra contaminado, sucio o evidentemente deteriorado.

ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL

Manténgase fuera de la luz del sol. Manténgase seco.
Caducidad: 5 años.

MEDIDAS DE LA UNIDAD DE PRODUCTO

REFERENCIA	TOTAL DEL PRODUCTO (mm)	L CONEXIONES HEMBRA (mm)	L CONEXIÓN MACHO (mm)
8400020	55x25	11	13

Envasado en blíster unitario con descripción de producto

PRESENTACIÓN

REFERENCIA	UNIDADES CAJA	MEDIDAS CAJA (cm)	PESO CAJA* (kg)
8400020	500 Uds. (10 cajas de 50 uds.)	42x38x23	3.86

* TOLERANCIAS: Peso $\pm$ 0.5 Kg

CUMPLE CON:

- Directiva 93/42/CEE del Consejo, Directiva 2007/47/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Clase I, estéril (de acuerdo a Anexo IX de la Directiva 93/42 y Anexo VIII del Reglamento 2017/745).
- Empresa certificada por la ISO 13485 e ISO 9001.
- Licencia de Distribuidor No.: 3689-PS.

