

Llave de 3 vías

Apta para lípidos

INDICACIONES

Llave de 3 vías es un producto sanitario esterilizado con óxido de etileno y de fácil visualización para poder ser identificado sin necesidad de apertura.

Tres vías de paso con dos conexiones luer-lock hembra y una macho. Con tapón protector.

El producto es apto para lípidos, citostáticos, antisépticos y otros medicamentos de alto poder cáustico.



COMPOSICIÓN

Cuerpo de policarbonato totalmente transparente. Exento de látex, PVC y apirógeno.

MODO DE EMPLEO

Uso recomendado para la infusión y administración intermitente de medicamentos por vía intravenosa.

- Revisar con atención la integridad del envase del producto, así como la fecha de caducidad para comprobar el buen estado de este. Retirar la llave de tres vías del envase.
- Separar cuidadosamente los tapones protectores.
- Utilizar el producto inmediatamente después de abrir el blíster individual.
- Conectar con el terminal correspondiente el conector de la alargadera o de otro dispositivo compatible.
- Hacer que el líquido fluya y se desplace el aire del tubo.
- Limpiar el sitio de inyección y conectar con el paciente.

CARACTERÍSTICAS

Esterilizado con gas óxido de etileno, conforme ISO 11135.

Compatible con sangre y hemoderivados.

Resistencia a la presión hidrostática: 6 bares.

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

Un solo uso.

El uso por más de un paciente puede provocar una infección cruzada.

No utilizar el producto sobre piel lesionada.

No utilizar el producto si éste se encuentra contaminado, sucio o evidentemente deteriorado.

Importado y Distribuido por:

C.V. MEDICA SL · C/ Ponent, 1 Pol. Ind. La Plana · 43424 Sarral - Tarragona - Spain · T.+34 977 890 598

www.cvmedica.com

ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL

Manténgase fuera de la luz del sol. Manténgase seco.
Caducidad: 5 años.

MEDIDAS DE LA UNIDAD DE PRODUCTO

REFERENCIA	TOTAL DEL PRODUCTO (mm)	L CONEXIONES HEMBRA (mm)	L CONEXIÓN MACHO (mm)
8400020	50x25	11	13

Envasado en blíster unitario con descripción de producto

PRESENTACIÓN

REFERENCIA	UNIDADES CAJA	MEDIDAS CAJA (cm)	PESO CAJA* (kg)
8400020	500 Uds. (10 cajas de 50 uds.)	56x30x18	3.87

* TOLERANCIAS: Peso \pm 0.5 Kg

CUMPLE CON:

- Directiva 93/42/CEE del Consejo, Directiva 2007/47/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Clase IIA, estéril (de acuerdo a Anexo IX de la Directiva 93/42 y Anexo VIII del Reglamento 2017/745).
- Empresa certificada por la ISO 13485 e ISO 9001.
- Licencia de Distribuidor No.: 3689-PS.


FABRICANTE

La-med Healthcare Pvt. Ltd. - INDIA

Empresa certificad por ISO 13485 y en cumplimiento con la Directiva 93/42/EEC del Consejo, Directiva 2007/47/EC del Parlamento Europeo.

Importado y Distribuido por:

C.V. MEDICA SL · C/ Ponent, 1 Pol. Ind. La Plana · 43424 Sarral - Tarragona - Spain · T.+34 977 890 598

www.cvmedica.com