

Robinet 3 voies

Avec rallonge

INDICATIONS

Le **Robinet 3 voies avec rallonge** est un dispositif médical stérilisé à l'oxyde d'éthylène et facile à voir, de sorte qu'il peut être identifié sans besoin de l'ouvrir.

Trois voies avec deux connexions luer-lock femelle et une mâle. Avec des rallonges de différentes tailles et un capuchon de protection.

Le produit est apte pour les lipides, cytostatiques, antiseptiques et autres médicaments très caustiques.



COMPOSITION

Corps en polycarbonate entièrement transparent. Rallonge pour tuyau PVC DEHP FREE Ø 2.6x3.9 mm (8400022 Ø 3.0x4.1 mm). Sans latex et apyrogène.

MODE D'EMPLOI

Utilisation recommandée pour la perfusion et l'administration intermittente de médicaments par voie intraveineuse.

- Retirer les capuchons de protection et connectez le robinet 3 voies aux bornes.
- Faire couler le liquide et déplacer l'air dans le tube.
- Connectez le connecteur de la rallonge à la borne correspondante.

CARACTÉRISTIQUES

Stérilisé à l'oxyde d'éthylène gazeux, conformément à la norme ISO 11135.

Compatible avec le sang et les hémodérivés.

Résistance à la pression hydrostatique : 3-5 bar.

AVERTISSEMENTS ET RECOMMANDATIONS

À usage unique.

L'utilisation par plus d'un patient peut entraîner une infection croisée.

Ne pas utiliser le produit s'il est contaminé, sale ou manifestement endommagé.

STOCKAGE ET DURÉE D'UTILISATION

Ne pas exposer à la lumière du soleil. Le garder au sec.

Expiration : 5 ans.

DIMENSIONS DE L'UNITÉ DE PRODUIT

RÉFÉRENCE	LONGUEUR RALLONGE (cm)
8400021	10
8400023	25
8400024	50
8400025	100

Conditionnement sous blister unitaire avec description du produit

PRÉSENTATION			
RÉFÉRENCE	UNITÉS BOÎTE	DIMENSIONS BOÎTE (cm)	POIDS BOÎTE* (kg)
8400021	200 unités (8 sacs de 25 unités)	39x38x29	2.49
8400023	200 unités (10 sacs de 20 unités)	39x39x28	2.69
8400024	200 unités (10 sacs de 20 unités)	39x39x28	3.10
8400025	200 unités (10 sacs de 20 unités)	39x39x28	3.97

* TOLÉRANCES : Poids ± 0.5 Kg

CONFORME À :

- Directive 93/42/CEE du Conseil, Directive 2007/47/CE du Parlement européen et du Conseil et Règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil.
- Classe IIA, stérile (selon l'Annexe IX de la directive 93/42 et l'Annexe VIII du Règlement 2017/745).
- Entreprise certifiée ISO 13485 et ISO 9001.
- Licence de Distributeur N° : 3689-PS.



Robinet 3 voies

Avec rallonge

INDICATIONS

Le **Robinet 3 voies avec rallonge** est un dispositif médical stérilisé à l'oxyde d'éthylène et facile à voir, de sorte qu'il peut être identifié sans besoin de l'ouvrir.

Trois voies avec deux connexions luer-lock femelle et une mâle. Rallonge de 10 cm de luer lock mâle mobile et capuchon de protection.

Le produit est apte pour les lipides, cytostatiques, antiseptiques et autres médicaments très caustiques.



COMPOSITION

Corps en polycarbonate entièrement transparent. Rallonge pour tuyau DEHP FREE Ø 3.0x4.1 mm. Sans latex et apyrogène.

MODE D'EMPLOI

Utilisation recommandée pour la perfusion et l'administration intermittente de médicaments par voie intraveineuse.

- Retirer les capuchons de protection et connectez le robinet 3 voies aux bornes.
- Faire couler le liquide et déplacer l'air dans le tube.
- Connectez le connecteur de la rallonge à la borne correspondante.

CARACTÉRISTIQUES

Stérilisé à l'oxyde d'éthylène gazeux, conformément à la norme ISO 11135.

Compatible avec le sang et les hémodérivés.

Résistance à la pression hydrostatique : 3-5 bar.

AVERTISSEMENTS ET RECOMMANDATIONS

À usage unique.

L'utilisation par plus d'un patient peut entraîner une infection croisée.

Ne pas utiliser le produit s'il est contaminé, sale ou manifestement endommagé.

STOCKAGE ET DURÉE D'UTILISATION

Ne pas exposer à la lumière du soleil. Le garder au sec.

Expiration : 5 ans.

DIMENSIONS DE L'UNITÉ DE PRODUIT

RÉFÉRENCE	LONGUEUR RALLONGE (cm)
8400022	10

Conditionnement sous blister unitaire avec description du produit

PRÉSENTATION

RÉFÉRENCE	UNITÉS BOÎTE	DIMENSIONS BOÎTE (cm)	POIDS BOÎTE* (kg)
8400021	200 unités (10 sacs de 20 unités)	39x39x28	2.58

* TOLÉRANCES : Poids ± 0.5 Kg

CONFORME À :

- Directive 93/42/CEE du Conseil, Directive 2007/47/CE du Parlement européen et du Conseil et Règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil.
- Classe IIA, stérile (selon l'Annexe IX de la directive 93/42 et l'Annexe VIII du Règlement 2017/745).
- Entreprise certifiée ISO 13485 et ISO 9001.
- Licence de Distributeur N° : 3689-PS.

