

Llave de 3 vías

Con alargadera

INDICACIONES

Llave de 3 vías con alargadera es un producto sanitario esterilizado con óxido de etileno y de fácil visualización para poder ser identificado sin necesidad de apertura.

Tres vías de paso con dos conexiones luer-lock hembra y una macho. Con alargaderas de distintos tamaños y tapón protector.

El producto es apto para lípidos, citostáticos, antisépticos y otros medicamentos de alto poder cáustico



COMPOSICIÓN

Cuerpo de policarbonato totalmente transparente. Alargadera de tubo PVC DEHP FREE Ø 2.6x3.9 mm (8400022 Ø 3.0x4.1 mm). Exento de látex y apirógeno

MODO DE EMPLEO

Uso recomendado para la infusión y administración intermitente de medicamentos por vía intravenosa.

- Retirar los tapones protectores y conectar la llave de 3 vías a los terminales.
- Hacer que el líquido fluya y se desplace el aire del tubo.
- Conectar el conector de la alargadera con el terminal correspondiente.

CARACTERÍSTICAS

Esterilizado con gas óxido de etileno, conforme ISO 11135.

Compatible con sangre y hemoderivados.

Resistencia a la presión hidrostática: 3-5 bares.

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

Un solo uso.

El uso por más de un paciente puede provocar una infección cruzada.

No utilizar el producto si éste se encuentra contaminado, sucio o evidentemente deteriorado.

ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL

Manténgase fuera de la luz del sol. Manténgase seco.

Caducidad: 5 años.

MEDIDAS DE LA UNIDAD DE PRODUCTO

| REFERENCIA | LONGITUD ALARGADERA (cm) |
|------------|--------------------------|
| 8400021 | 10 |
| 8400023 | 25 |
| 8400024 | 50 |
| 8400025 | 100 |

Envasado en blíster unitario con descripción de producto

PRESENTACIÓN

| REFERENCIA | UNIDADES CAJA | MEDIDAS CAJA (cm) | PESO CAJA* (kg) |
|------------|------------------------------------|-------------------|-----------------|
| 8400021 | 200 Uds. (8 bolsas de 25 Uds.) | 39x38x29 | 2.49 |
| 8400023 | 200 Uds. (10 bolsas de 20 Uds.) | 39x39x28 | 2.69 |
| 8400024 | 200 Uds. (10 bolsas de 20 Uds.) | 39x39x28 | 3.10 |
| 8400025 | 200 Uds. (10 bolsas de 20 Uds.) | 39x39x28 | 3.97 |

* TOLERANCIAS: Peso ± 0.5 Kg

CUMPLE CON:

- Directiva 93/42/CEE del Consejo, Directiva 2007/47/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Clase IIA, estéril (de acuerdo a Anexo IX de la Directiva 93/42 y Anexo VIII del Reglamento 2017/745).
- Empresa certificada por la ISO 13485 e ISO 9001.
- Licencia de Distribuidor No.: 3689-PS.



Llave de 3 vías

Con alargadera

INDICACIONES

Llave de 3 vías con alargadera es un producto sanitario esterilizado con óxido de etileno y de fácil visualización para poder ser identificado sin necesidad de apertura.

Tres vías de paso con dos conexiones luer-lock hembra y una macho. Alargadera de 10cm de luer lock macho móvil y tapón protector.

El producto es apto para lípidos, citostáticos, antisépticos y otros medicamentos de alto poder cáustico



COMPOSICIÓN

Cuerpo de policarbonato totalmente transparente. Alargadera de tubo PVC DEHP FREE Ø 3.0x4.1 mm. Exento de látex y apirógeno

MODO DE EMPLEO

Uso recomendado para la infusión y administración intermitente de medicamentos por vía intravenosa.

- Retirar los tapones protectores y conectar la llave de 3 vías a los terminales.
- Hacer que el líquido fluya y se desplace el aire del tubo.
- Conectar el conector de la alargadera con el terminal correspondiente.

CARACTERÍSTICAS

Esterilizado con gas óxido de etileno, conforme ISO 11135.

Compatible con sangre y hemoderivados.

Resistencia a la presión hidrostática: 3-5 bares.

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

Un solo uso.

El uso por más de un paciente puede provocar una infección cruzada.

No utilizar el producto si éste se encuentra contaminado, sucio o evidentemente deteriorado.

ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL

Manténgase fuera de la luz del sol. Manténgase seco.

Caducidad: 5 años.

MEDIDAS DE LA UNIDAD DE PRODUCTO

| REFERENCIA | LONGITUD ALARGADERA (cm) |
|------------|--------------------------|
| 8400022 | 10 |

Envasado en blíster unitario con descripción de producto

PRESENTACIÓN

| REFERENCIA | UNIDADES CAJA | MEDIDAS CAJA (cm) | PESO CAJA* (kg) |
|------------|------------------------------------|-------------------|-----------------|
| 8400021 | 200 Uds. (10 bolsas de 20 Uds.) | 39x39x28 | 2.58 |

 * TOLERANCIAS: Peso \pm 0.5 Kg

CUMPLE CON:

- Directiva 93/42/CEE del Consejo, Directiva 2007/47/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Clase IIA, estéril (de acuerdo a Anexo IX de la Directiva 93/42 y Anexo VIII del Reglamento 2017/745).
- Empresa certificada por la ISO 13485 e ISO 9001.
- Licencia de Distribuidor No.: 3689-PS.

