

Dispomedic Syringes

Jeringa 3 cuerpos luer / luer-lock

INDICACIONES

Jeringa 3 cuerpos luer / luer-lock es un producto sanitario esterilizado con óxido de etileno, de un solo uso y apirógenas. Jeringa de 3 piezas cuerpo, émbolo y junta de estanqueidad. Su finalidad es la de succionar e introducir líquidos. No aptas para altas presiones ni medicamentos citostáticos.



COMPOSICIÓN

El cuerpo de la jeringa y su émbolo están fabricados en polipropileno atóxico y apirógeno. La junta de estanqueidad con doble anillo de deslizamiento está fabricada con caucho sintético. Todo el material está exento de látex y PVC.

CARACTERÍSTICAS

CUERPO:

- Cono luer de precisión para garantizar una segura conexión de la aguja.
- Cono catéter en jeringas a partir de 50ml para uso en alimentación.
- Cono luer-lock de precisión para garantizar una segura conexión de conectores y válvulas.
- La idónea posición del cono excéntrico garantiza una mayor comodidad de uso en la inyección y extracción de líquidos y fluidos corporales.
- Cilindro transparente que permite una dosificación más fácil y precisa, así como la observación y eliminación de burbujas de aire.
- Escala nítida y precisa que permite una dosificación exacta y sencilla. Todas las jeringas con lectura extra.

ÉMBOLO

- Lubricante modificado que permite un avance más suave y regular del émbolo, tanto en la toma de muestras como en la administración del medicamento.
- Diseño anatómico del émbolo que facilita la manipulación de la jeringa.
- Anillo de seguridad que evita que el émbolo se salga accidentalmente del cuerpo de la jeringa.
- Junta de estanqueidad para mayor precisión.

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

Un solo uso.

El uso por más de un paciente puede provocar una infección cruzada.

No utilizar el producto si éste se encuentra contaminado, sucio o evidentemente deteriorado.

ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL

Manténgase fuera de la luz del sol. Manténgase seco. Proteger de la humedad y de fuentes de calor.

No almacenar junto a disolventes orgánicos ni químicos.

Caducidad: 5 años.

MEDIDAS DE LA UNIDAD DE PRODUCTO

Envasado en blíster unitario con descripción de producto

PRESENTACIÓN					
REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDADES CAJA	VOLUMEN (ml)	MEDIDAS CAJA (cm)	PESO CAJA* (kg)
8500003	Jeringa 3 cuerpos Cono Luer concéntrico	3000 Uds. (30 dispensadores)	2 + 0.5 ml	61x49x39	13.12
8500005	Jeringa 3 cuerpos Cono Luer concéntrico	2400 Uds. (24 dispensadores)	5 + 1 ml	61x49x39	14.41
8500010	Jeringa 3 cuerpos Cono Luer excéntrico	1600 Uds. (16 dispensadores)	10 + 2 ml	61x49x39	15.54
8500020	Jeringa 3 cuerpos Cono Luer excéntrico	800 Uds. (16 dispensadores)	20 + 2 ml	62x47x34	13.39
8500050	Jeringa 3 cuerpos Cono Luer excéntrico	400 Uds. (16 dispensadores)	50 + 10 ml	61x49x39	15.05
8500051	Jeringa 3 cuerpos Cono catéter (alimentación)	400 Uds. (16 dispensadores)	50 + 10 ml	61x49x39	15.80
8500100	Jeringa 3 cuerpos Cono catéter con adaptador	100 Uds. (4 dispensadores)	100 ml	56x33x32	6.48
8501002	Jeringa 3 cuerpos Cono Luer Lock	3000 Uds. (30 dispensadores)	2 + 0.5 ml	61x49x39	13.49
8501005	Jeringa 3 cuerpos Cono Luer Lock	2400 Uds. (24 dispensadores)	5 + 1 ml	61x49x39	14.76
8501010	Jeringa 3 cuerpos Cono Luer Lock	1600 Uds. (16 dispensadores)	10 + 2 ml	61x49x39	15.52
8501020	Jeringa 3 cuerpos Cono Luer Lock	800 Uds. (16 dispensadores)	20 + 2 ml	62x47x34	13.58
8501050	Jeringa 3 cuerpos Cono Luer Lock	400 Uds. (4 dispensadores)	50 + 10 ml	61x49x39	15.14

* TOLERANCIAS: Peso ± 0.5 Kg

CUMPLE CON:

- Directiva 93/42/CEE del Consejo, Directiva 2007/47/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Clase IIA, estéril (de acuerdo a Anexo IX de la Directiva 93/42).
- Empresa certificada por la ISO 13485 e ISO 9001.
- Licencia de Distribuidor No.: 3689-PS.


JIANGSU KANGHUA MEDICAL EQUIPMENT CO. LTD.

Importado y Distribuido por:

C.V. MEDICA SL · C/ Ponent, 1 Pol. Ind. La Plana · 43424 Sarral - Tarragona - Spain · T.+34 977 890 598

www.cvmedica.com