

Dispoglove

Gants savonneux à usage unique

Dispoglove est un gant savonneux qui est très confortable à utiliser.

Gant hygiénique, spécialement indiqué pour l'usage sanitaire et d'assistance, jetable et prêt à libérer toutes ses propriétés au moment où il entre en contact avec l'eau. Avec un savon qui aide à maintenir la barrière protectrice de la peau et qui procure également un parfum agréable et frais.

Conception ergonomique pour éviter qu'il ne glisse de la main lors de son utilisation.

Le produit est spécialement conçu pour le soin et le nettoyage de la peau, notamment pour les personnes qui ont besoin d'une attention particulière.



Informations du produit

Dimensions de l'unité

25x17 cm $\pm 5\%$

Gant	Matériau	Grammage
Couche antérieure avec du savon	Fibre synthétique de polyester. Sans latex.	100g/m ² $\pm 5\%$
Couche postérieure	Fibre synthétique de polyester. Sans latex.	50 g/m ² $\pm 5\%$

SAVON : Gel dermatologique, pH 5.5 ± 0.5 . Apte pour les enfants.

Ingrédients	Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Chloride, Cocamide Dea, Cocamidopropyl Betaine, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Citric Acid, Parfum, C.I. 61570, Linalool.
-------------	---

Chaque gant contient 2-3 g de savon avant le séchage.

Qualité microbiologique contrôlée.

Gel spécialement formulé avec une forte présence d'ingrédients émollients pour la protection de la peau, qui peuvent réduire la mousse pendant l'utilisation, sans diminuer la capacité de nettoyage de la peau.

Mode d'emploi



Le savon du gant **Dispoglove** est activé avec quelques gouttes d'eau. **NE PAS PLONGER DANS L'EAU.**

- Frotter doucement et savonner la peau.
- Rincer à l'eau et sécher soigneusement la peau après le bain.



Avertissements et Recommandations

Tenir hors de portée des enfants.

Ne pas avaler. Éviter tout contact avec les yeux. Usage externe.

Utiliser des récipients correctement désinfectés pour chaque bain des patients.

Utiliser de l'eau tiède pour le confort du patient.

Jeter après usage

Stockage et durée d'utilisation

Conserver dans un endroit frais et sec. Protéger de la lumière du soleil.

Expiration : 5 ans.

PRÉSENTATION

RÉFÉRENCE	UNITÉS PAQUET	UNITÉS BOÎTE	DIMENSIONS BOÎTE (cm)	POIDS BOÎTE * (kg)
0000301	20 unités	800 unités 40 PAQUETS	60x40x34	5.4

* TOLÉRANCES : Poids $\pm$ 0.5 Kg

Code-barres emballage individuel : EAN13 8427835100392

Conforme à :

- Bonnes pratiques de fabrication des produits cosmétiques selon la norme ISO 22716.
- Règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux produits cosmétiques.
- Testé sous contrôle pédiatrique.
- Testé sous contrôle dermatologique.
- Testé sous contrôle gynécologique.
- Entreprise certifiée ISO 22716 et ISO 9001.

