

DISPOMEDIC P SCRUB

CEPILLO / ESPONJA con povidona yodada para el lavado y antisepsia de la piel

DESCRIPCIÓN:

Cepillo/Espuma con **povidona yodada 7.5 %** indicado para el lavado y antisepsia de manos del personal técnico-sanitario. Un sólo uso, lavado antiséptico para piel sana. Lavado de manos en zonas de alto riesgo. Higiene del paciente preoperatorio. Para uso prequirúrgico.

COMPOSICIÓN:

CEPILLO: Polietileno
ESPONJA: 100% espuma de poliuretano
ANTISEPTICO: Povidona Yodada a 7.5%, Excipientes c.s.p. 100% (20 ml aprox)
LIMPIAÚÑAS*: copolímero de ABS (acrilonitrilo butadieno estireno)

MODO DE EMPLEO

Lavar las manos con agua, sacar el cepillo del envoltorio ayudándose de la apertura fácil ubicada en un extremo del envase. Aplicar en antiséptico de 3 a 5 minutos frotando con el cepillo y la esponja, insistiendo en las zonas interdigitales y uñas. Ayúdese del dispositivo limpiaúñas* y posteriormente enjuagar y secar con toallas desechables o aire caliente.

ADVERTENCIAS

Solo para uso externo. Evítase el contacto con los ojos, mucosas y zonas sensibles de la piel. Irrita los ojos y ligero irritante de piel. Posible hipersensibilidad en contacto con la piel. En caso de contacto con los ojos lavar inmediata y abundantemente con agua. Utilizar con precaución en niños menores de 2 años. No utilizar en personas sensibles a sus componentes ni durante tiempo prolongado. No utilizar con derivados mercuriales. No utilizar en neonatos, ni en mujeres en el periodo peri natal, ni durante el periodo de lactancia. No utilizar en personas con alteraciones tiroideas. En caso de intoxicación o ingestión accidental, llamar al Servicio Médico de información Toxicológica, Telf.: 91 562 04 20.

CARACTERÍSTICAS:

Cepillo con cerdas unido a una suave esponja. Diseño anatómico para obtener una mayor comodidad y flexibilidad para el usuario. Puede contener un dispositivo limpiaúñas para ayudar en la función de limpieza.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS:

Aspecto: líquido Color: MARRÓN Densidad: 1.04 ± 0.035 g/ml

MEDIDA DEL PRODUCTO UNITARIO:

80 x 50 x 37 mm ± 2.5 mm



PRESENTACION				
REFERENCIA	DESCRIPCION	UNID/CAJA	MEDIDAS CAJA (cm)	PESO CAJA** (kg)
0030210	DISPOMEDIC P SCRUB	100	38 x 21 x 35 Caja con apertura lateral	3.5
0030210B	DISPOMEDIC P SCRUB *con limpiaúñas	100	38 x 21 x 35 Caja con apertura lateral	3.5
0030210C	DISPOMEDIC P SCRUB	450	60 x 39.5 x 50.5 15 dispensadores de 30 Uds.	18
0030210D	DISPOMEDIC P SCRUB *con limpiaúñas	450	60 x 39.5 x 50.5 15 dispensadores de 30 Uds.	18

** TOLERANCIAS: Peso ± 0.5 Kg

CUMPLE CON:

REGLAMENTO (UE) No 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización y el uso de los biocidas
EN ISO 12791:2005 Antisépticos y desinfectantes químicos. Desinfección quirúrgica de las manos. Requisitos y métodos de ensayo (fase 2/etapa 2).

UNE-EN 13624:2014 Antisépticos y desinfectantes químicos. Ensayo cuantitativo de suspensión para la evaluación de la actividad fungicida o levuricida en medicina. Método de ensayo y requisitos (fase 2, etapa 1).

UNE-EN 1650:2008 Antisépticos y desinfectantes químicos. Ensayo cuantitativo de suspensión para la evaluación de la actividad fungicida o levuricida de los antisépticos y desinfectantes químicos utilizados en el área alimentaria, industrial, doméstica e institucional. Método de ensayo y requisitos (fase 2, etapa 1).

UNE-EN 1499:1997 Antisépticos y desinfectantes químicos. Lavado higiénico de las manos. Método de ensayo y requisitos (fase 2/etapa 2).

UNE-EN 13727:2012+A1 Antisépticos y desinfectantes químicos. Ensayo cuantitativo de suspensión para la evaluación de la actividad bactericida en el área médica. Método de ensayo y requisitos (fase 2, etapa 1).

ISO 9001 empresa certificada.

Nº REG. AEMPS: 872-DES

