

DISPOSCRUB C

CEPILLO / ESPONJA con digluconato de clorhexidina para el lavado y antiseptia de la piel

DESCRIPCIÓN:

Cepillo/Esponja con **Clorhexidina 4 %** indicado para el lavado y antiseptia de manos del personal técnico-sanitario. Un sólo uso, lavado antiséptico para piel sana. Lavado de manos en zonas de alto riesgo. Higiene del paciente preoperatorio. Para uso prequirúrgico.

COMPOSICIÓN:

CEPILLO: Polietileno ESPONJA: 100% espuma de poliuretano
ANTIASEPTICO: Cada 100 g de producto contiene: 4 g Digluconato de Clorhexidina Clorhexidina (20 g de solución de Clorhexidina Digluconato 20 %), Propan-2-ol 3.9 g, Monohidrato de Ácido Cítrico 1.5 g, Excipientes c.s.p. 100 g. Alérgenos del perfume: Linalool, Citronellol, Geraniol, Eugenol, Amyl Cinnamal, Butilfenil Metilpropional, Alpha-Isomethyl Ionone. 20 ml aprox.
LIMPIAÚÑAS*: copolímero de ABS (acrilonitrilo butadieno estireno)



Modo de empleo: Mojar la piel con agua, aplicar el contenido del envase mediante el cepillo y frotar durante un 1 minuto y posteriormente aclarar con agua y secar con toallas desechables o aire caliente.

Consejos de prudencia: Uso externo. No ingerir. No inhalar. Aplicar sobre piel sana. Evitar el contacto con los ojos, mucosas, zonas sensibles o enfermas de la piel y heridas. Puede provocar reacciones cutáneas o alérgicas. No utilizar en personas sensibles a sus componentes, ni en áreas extensas de la piel, ni durante tiempo prolongado, ni con tejidos no transpirables. No mezclar con otros productos. No utilizar en neonatos. Mantener fuera del alcance de los niños. Utilizar con precaución en niños menores de 2 años, puede causar quemaduras químicas en la piel. EN CASO DE INTOXICACIÓN O DE INGESTIÓN ACCIDENTAL, llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA (Teléfono del Servicio Nacional de Información toxicológica 91 562 04 20) o a un médico en caso de malestar. A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso. Deberá desecharse correctamente, evitando la liberación al medio ambiente. Cepillo de un solo uso. Desechar tras su aplicación.

Precauciones: Provoca lesiones oculares graves. Muy tóxico para los organismos acuáticos. Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. No utilizar con detergentes aniónicos ni junto a derivados clorados.

CARACTERÍSTICAS:

Cepillo con cerdas unido a una suave esponja. Diseño anatómico para obtener una mayor comodidad y flexibilidad para el usuario. Puede contener un dispositivo limpiaúñas para ayudar en la función de limpieza.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS:

Aspecto: líquido Color: rosa Densidad: 1.03 ± 0.02 g/ml

MEDIDA DEL PRODUCTO UNITARIO:

80 x 50 x 37 mm ± 2.5 mm

PRESENTACION				
REFERENCIA	DESCRIPCION	UNID/CAJA	MEDIDAS CAJA (cm)	PESO CAJA** (kg)
0030230	DISPOSCRUB C	100	38 x 21 x 35 Caja con apertura lateral	3.7
0030230B	DISPOSCRUB C *con limpiaúñas	100	38 x 21 x 35 Caja con apertura lateral	3.7
0030230C	DISPOSCRUB C	450	60 x 39.5 x 50.5 15 dispensadores de 30 Uds.	18.6
0030230D	DISPOSCRUB C *con limpiaúñas	450	60 x 39.5 x 50.5 15 dispensadores de 30 Uds.	18.6

** TOLERANCIAS: Peso ± 0.5 Kg

CUMPLE CON:

REGLAMENTO (UE) No 528/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 22 de mayo de 2012 relativo a la comercialización y el uso de los biocidas.

EN 13624:2014 Antisépticos y desinfectantes químicos. Ensayo cuantitativo de suspensión para la evaluación de la actividad fungicida o levuricida en medicina. Método de ensayo y requisitos (fase 2, etapa 1).

EN 13727:2012 Antisépticos y desinfectantes químicos. Ensayo cuantitativo de suspensión para la evaluación de la actividad bactericida en el área médica. Método de ensayo y requisitos (fase 2, etapa 1).

EN 12791:2005 Antisépticos y desinfectantes químicos. Desinfección quirúrgica de las manos. Requisitos y métodos de ensayo (fase 2/etapa 2).

EN 1499:2013 Antisépticos y desinfectantes químicos. Lavado higiénico de las manos. Método de ensayo y requisitos (fase 2/etapa 2)

ISO 9001:2015 Empresa certificada.

Nº REG. AEMPS: 833-DES

