

# DISPOSCRUB SPONGE C

**ESPONJA con digluconato de clorhexidina para el lavado y antiseptia de la piel**

**DESCRIPCIÓN**

España para la antiseptia de la piel. Sólo para piel sana. Medidas estándar para limpieza de cuerpo entero. Respetuosa con la piel. Mínimo riesgo de irritación y abrasión, lo que reduce el riesgo de infección. No reutilizable.

**COMPOSICIÓN**

ESPONJA: 100% espuma de poliuretano  
 ANTISEPTICO: Cada 100g de producto contiene: 4g Digluconato de Clorhexidina (20 g de solución de Clorhexidina Digluconato 20 %), Excipientes c.s.p. 100 g. Volumen final: 20 ml aprox.

**MODO DE EMPLEO**

Lavar la piel con agua, sacar la esponja del envoltorio ayudándose de la apertura fácil ubicada en un extremo del envase. Una vez extraída la esponja del envoltorio desechar el envoltorio. Aplicar el antiséptico 1 minuto como en ducha habitual y posteriormente enjuagar y secar con toallas desechables o aire caliente.



**ADVERTENCIAS**

Solo para uso externo. No ingerir. Irrita los ojos. Evítase el contacto con los ojos, mucosas y zonas sensibles o enfermas de la piel. En caso de contacto con los ojos lavar inmediata y abundantemente con agua. No utilizar en personas sensibles a sus componentes, ni en áreas extensas de la piel, ni durante tiempo prolongado. Manténgase fuera del alcance de los niños y lejos de alimentos y bebidas. Al fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso. No utilizar con detergentes aniónicos. En caso de intoxicación o de ingestión accidental, llamar al Servicio Médico de información Toxicológica, Telf.: 91 562 04 20. En caso de ingestión, acuda inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase.

**CARACTERÍSTICAS**

España de densidad adecuada para conferir al producto un tacto suave. Medidas estándar para la limpieza del cuerpo.

**PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS**

Aspecto: líquido Color: rosa Densidad: 1.02 ± 0.025 g/ml

**MEDIDA DEL PRODUCTO UNITARIO**

100 x 100 x 25 mm ± 2.5 mm

**ALMACENAJE**

Almacenar en lugar fresco y seco. Proteger de la luz solar. Mantener a temperaturas comprendidas entre 5 y 30°C.

PRESENTACION				
REFERENCIA	DESCRIPCION	UNID/CAJA	MEDIDAS CAJA (cm)	PESO CAJA** (kg)
0030330	DISPOSCRUB SPONGE C	120	40x26x47	4.1

\*\* TOLERANCIAS: Peso ± 0.5 Kg

**CUMPLE CON:**

**REGLAMENTO (UE) No 528/2012** DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 22 de mayo de 2012 relativo a la comercialización y el uso de los biocidas.

**EN 13624:2014** Antisépticos y desinfectantes químicos. Ensayo cuantitativo de suspensión para la evaluación de la actividad fungicida o levuricida en medicina. Método de ensayo y requisitos (fase 2, etapa 1).

**EN 13727:2012** Antisépticos y desinfectantes químicos. Ensayo cuantitativo de suspensión para la evaluación de la actividad bactericida en el área médica. Método de ensayo y requisitos (fase 2, etapa 1).

**EN 12791:2005** Antisépticos y desinfectantes químicos. Desinfección quirúrgica de las manos. Requisitos y métodos de ensayo (fase 2/etapa 2).

**EN 1499:1997** Antisépticos y desinfectantes químicos. Lavado higiénico de las manos. Método de ensayo y requisitos (fase 2/etapa 2).

**ISO 9001:2015** empresa certificada.

Nº REG. AEMPS: 833-DES

