

DISPOSCRUB SPONGE C

ESPONJA con digluconato de clorhexidina para el lavado y antiseptia de la piel

DESCRIPCIÓN

España para la antiseptia del paciente pre-operatorio. Sólo para piel sana. Medidas estándar para limpieza de cuerpo entero. Respetuosa con la piel. Mínimo riesgo de irritación y abrasión, lo que reduce el riesgo de infección. No reutilizable.

COMPOSICIÓN

ESPONJA: 100% espuma de poliuretano
 ANTISEPTICO: Digluconato de Clorhexidina al 4% (20 g de solución de Clorhexidina Digluconato 20 %), Excipientes c.s.p. 100 g. 20 ml aprox.

MODO DE EMPLEO

Lavar la piel con agua, sacar la esponja del envoltorio ayudándose de la apertura fácil ubicada en un extremo del envase. Una vez extraída la esponja del envoltorio desechar el envoltorio. Aplicar el antiséptico 1 minuto como en ducha habitual y posteriormente enjuagar y secar con toallas desechables o aire caliente.



ADVERTENCIAS

Solo para uso externo. No ingerir. Irrita los ojos. Evítase el contacto con los ojos, mucosas y zonas sensibles o enfermas de la piel. En caso de contacto con los ojos lavar inmediata y abundantemente con agua. No utilizar en personas sensibles a sus componentes, ni en áreas extensas de la piel, ni durante tiempo prolongado. Manténgase fuera del alcance de los niños y lejos de alimentos y bebidas. Al fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso. No utilizar con detergentes aniónicos. En caso de intoxicación o de ingestión accidental, llamar al Servicio Médico de información Toxicológica, Telf.: 91 562 04 20. En caso de ingestión, acuda inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase.

CARACTERÍSTICAS

España de densidad adecuada para conferir al producto un tacto suave. Medidas estándar para la limpieza del cuerpo.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Aspecto: líquido Color: rosa Densidad: 1.02 ± 0.025 g/ml

MEDIDA DEL PRODUCTO UNITARIO

100 x 100 x 25 mm ± 2.5 mm

ALMACENAJE

Almacenar en lugar fresco y seco. Proteger de la luz solar. Mantener a temperaturas comprendidas entre 5 y 30°C.

PRESENTACION				
REFERENCIA	DESCRIPCION	UNID/CAJA	MEDIDAS CAJA (cm)	PESO CAJA** (kg)
0030330	DISPOSCRUB SPONGE C	120	40x26x47	4.1
0030330E	DISPOMEDIC SPONGE C PLUS 15 dispensadores de 24 unidades	360	60x39.5x50.5	11.2

** TOLERANCIAS: Peso ± 0.5 Kg

CUMPLE CON:

REGLAMENTO (UE) No 528/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 22 de mayo de 2012 relativo a la comercialización y el uso de los biocidas.

EN 13624:2014 Antisépticos y desinfectantes químicos. Ensayo cuantitativo de suspensión para la evaluación de la actividad fungicida o levuricida en medicina. Método de ensayo y requisitos (fase 2, etapa 1).

EN 13727:2012 Antisépticos y desinfectantes químicos. Ensayo cuantitativo de suspensión para la evaluación de la actividad bactericida en el área médica. Método de ensayo y requisitos (fase 2, etapa 1).

EN 12791:2005 Antisépticos y desinfectantes químicos. Desinfección quirúrgica de las manos. Requisitos y métodos de ensayo (fase 2/etapa 2).

EN 1499:1997 Antisépticos y desinfectantes químicos. Lavado higiénico de las manos. Método de ensayo y requisitos (fase 2/etapa 2).

ISO 9001:2015 empresa certificada.

Nº REG. AEMPS: 833-DES

