

# Dispofoam aloe vera

## Esponjas jabonosas de un solo uso con extracto de aloe vera

**Dispofoam aloe vera** es una esponja jabonosa de máxima suavidad que aporta una gran comodidad de uso.

Esponja higiénica, especialmente indicada para uso sanitario y asistencial, desechable, lista para liberar todas sus propiedades en el momento que entra en contacto con el agua. Con jabón que incorpora extracto de aloe vera para conseguir una óptima hidratación de la piel. Aroma fresco y agradable.

El producto está especialmente destinado al cuidado y limpieza de la piel, principalmente, en personas que requieren especial atención. Esponja de máxima suavidad.



### Información de producto

ESPONJA: Espuma de poliuretano. Libre de látex.

JABÓN: Gel dermatológico de pH 5.5 ±0.5. Apto para niños.

Densidad de la esponja	Medida de la unidad
15kg/m <sup>3</sup> ±5%	12x20 cm ±5%


<b>Ingredientes</b>	Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Chloride, Cocamide Dea, Cocamidopropyl Betaine, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Citric Acid, Parfum, Aloe Barbadensis, C.I. 47005, C.I. 42090, Linalool.
---------------------	---

Cada esponja contiene 3-4g de jabón antes de su secado.

Calidad microbiológica controlada.

Gel formulado especialmente con alta presencia de ingredientes emolientes para la protección de la piel, que pueden reducir la formación de espuma durante el uso, sin disminuir la capacidad de limpieza de la piel.

### Modo de Empleo

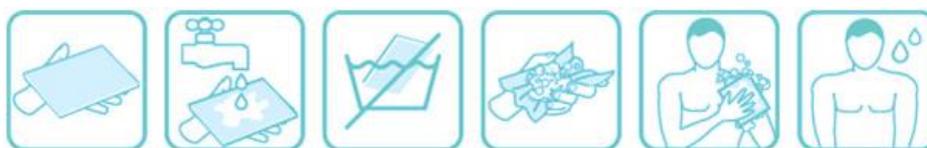

El jabón de la manopla **Dispofoam aloe vera** se activa con unas pocas gotas de agua. **NO SUMERGIR.**

- Frotar suavemente y enjabonar la piel.
- Aclarar con agua y secar bien la piel después del baño.

**Advertencias y Recomendaciones**

Mantener fuera del alcance de los niños  
 No ingerir. Evite el contacto con los ojos. Uso externo  
 Usar recipientes debidamente higienizados para cada baño de paciente.  
 Para mayor comodidad del paciente utilice agua templada.  
 Desechar después de su uso

**Almacenamiento y vida útil**

Almacenar en lugar fresco y seco. Proteger de la luz solar.  
 Caducidad: 5 años.

PRESENTACIÓN				
REFERENCIA	UNIDADES PAQUETE	UNIDADES CAJA	MEDIDAS CAJA (cm)	PESO CAJA* (kg)
0005404A **	20 Uds.	2400 Uds. 120 PACKS	80x60x62	14.5
2025404A	20 Uds.	800 Uds. 40 PACKS	60x40x44	4.1
0005404B	20 Uds.	1000 Uds. / saco 50 PACKS	84x50x73	4.1

\* TOLERANCIAS: Peso  $\pm$  0.5 Kg

\*\* Solo disponible para exportación fuera de España

**Código de barras envase individual:** EAN13 8427835100613

**Cumple con:**

- Buenas Prácticas de Fabricación de Productos Cosméticos según la norma ISO 22716.
- Reglamento (CE) núm. 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los Productos Cosméticos.
- Testado bajo control pediátrico.
- Testado bajo control dermatológico.
- Testado bajo control ginecológico.
- Empresa certificada ISO 22716 e ISO 9001

