

DISPOGLOVE ALOE VERA

Manopole saponate monouso

Dispoglove aloe vera è una manopola saponata molto comoda da usare.

Manopola igienica, specialmente indicata per uso sanitario e assistenziale, monouso e pronta a rilasciare tutte le sue proprietà nel momento in cui entra in contatto con l'acqua. Ha un sapone con estratto di aloe vera che aiuta a mantenere la barriera protettiva della pelle e fornisce anche un piacevole e fresco profumo.

Progettata ergonomicamente per evitare che scivoli dalla mano durante l'uso.

Il prodotto è appositamente progettato per la cura e la pulizia della pelle, soprattutto per le persone che richiedono un'attenzione speciale.



Misura unità

25x17 cm ± 5%

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Manopola	Materiale	Grammatura
Strato anteriore con sapone	Fibra sintetica di poliestere. Senza lattice.	100 g/m ² ± 5%
Strato posteriore	Fibra sintetica di poliestere. Senza lattice.	50 g/m ² ± 5%

SAPONE: Gel dermatologico pH 5,5 ± 0,5. Adatto ai bambini.

Ingredienti	
	Acqua, sodio laurilettere solfato, cloruro di sodio, cocamide dea, cocamidopropil betaina, sorbato di potassio, benzoato di sodio, acido citrico, profumo, aloe barbadensis, C.I. 47005, C.I. 42090, linalolo..

Ogni spugna contiene 2-3 g di sapone. Qualità microbiologica controllata.

Gel appositamente formulato con alta presenza di ingredienti emollienti per la protezione della pelle, con ridotta formazione di schiuma durante l'uso, senza ridurre la capacità di pulire la pelle.

MODALITÀ D'USO



Il sapone della manopola **DISPOGLOVE ALOE VERA** si attiva con alcune gocce d'acqua. **NON IMMERGERE.**

- Strofinare delicatamente e insaponare la pelle.
- Sciacquare con acqua e asciugare bene la pelle dopo il bagno.

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Non ingerire. Evitare il contatto con gli occhi.

Usare contenitori adeguatamente igienizzati per ogni bagno del paziente.

Usare acqua tiepida per il comfort del paziente.

Gettare dopo l'uso.

CONSERVAZIONE E DURATA

Conservare in luogo fresco e asciutto. Proteggere dalla luce del sole.

Scadenza: 5 anni.

PRESENTAZIONE				
RIFERIMENTO	CONFEZIONAMENTO	UNITÀ SCATOLA	MISURE SCATOLA (cm)	PESO SCATOLA* (kg)
0000308	20 unità	800 unità 40 CONFEZIONI	60x40x34	5,6

*TOLLERANZE: Peso \pm 0,5 kg

Codice a barre della confezione singola: EAN13 8427835100569

CONFORME A:

- Buone pratiche di fabbricazione dei prodotti cosmetici secondo la norma ISO 22716.
- Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici.
- Testato sotto supervisione pediatrica.
- Testato sotto controllo dermatologico.
- Testato sotto controllo ginecologico.
- Azienda certificata ISO 22716 e ISO 9001



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
ISO 22716:2007

www.tuv.com
ID 9105078921