

DISPOMEDIC SCRUB C PLUS

BROSSE / ÉPONGE avec digluconate de chlorhexidine pour le lavage et l'antiseptie de la peau

DESCRIPTION :

Brosse/Éponge avec **Chlorhexidine 0.8 %** indiquée pour le lavage et l'antiseptie des mains du personnel technique-de santé. À usage unique, lavage antiseptique pour une peau saine. Lavage des mains dans des zones à haut risque.

COMPOSITION :

BROSSE : Polyéthylène

ÉPONGE : 100 % mousse de polyuréthane

ANTISEPTIQUE : 100 g de produit contient : 0.8 g de digluconate de chlorhexidine (4 g de solution chlorhexidine digluconate à 20 %), Propan-2-ol 3.9 g, Acide citrique monohydraté 1.5 g, Excipients q.s.p. 100 g Allergènes du parfum : Linalool, Citronellol, Geraniol, Eugenol, Amyl Cinnamal, Butylphenyl Methylpropional, Alpha-Isomethyl Ionone. Environ 20 ml.

NETTOYEUR D'ONGLES* : copolymère ABS (acrylonitrile butadiène styrène) Sans latex.



Mode d'emploi : Mouiller la peau avec de l'eau, appliquer le contenu du récipient avec la brosse et frotter pendant 1 minute, puis rincer avec de l'eau et sécher avec des serviettes jetables ou de l'air chaud.

Conseils de sécurité : Usage externe. Ne pas avaler. Ne pas inhaler. Appliquer sur une peau saine. Éviter tout contact avec les yeux, les muqueuses, les zones cutanées sensibles ou malades et les plaies. Peut provoquer des réactions cutanées ou allergiques. Ne pas utiliser sur des personnes sensibles à ses composants, ni sur de grandes surfaces de la peau, ni pendant des périodes prolongées, ni avec des tissus non respirants. Ne pas mélanger avec d'autres produits. Ne pas utiliser chez les nouveau-nés. Tenir hors de portée des enfants. À utiliser avec précaution chez les enfants de moins de 2 ans. Peut provoquer des brûlures chimiques de la peau. EN CAS D'INTOXICATION OU D'INGESTION ACCIDENTELLE, appelez un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. Pour éviter les risques pour les personnes et l'environnement, suivre les instructions d'utilisation. Il doit être éliminé correctement, en évitant tout rejet dans l'environnement. Brosse à usage unique. Jeter après application.

Précautions : Provoque des lésions oculaires graves. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Ne pas utiliser avec des détergents anioniques ou avec des dérivés chlorés.

CARACTÉRISTIQUES :

Brosse avec des poils reliés à une éponge douce. Conception anatomique pour un plus grand confort et une plus grande flexibilité pour l'utilisateur. Peut contenir un nettoyeur d'ongles pour aider à la fonction de nettoyage.

PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES :

Aspect : liquide / Couleur : rose / Densité : 1.03 ± 0.02 g/ml

DIMENSION DU PRODUIT UNITAIRE :

80 x 50 x 37 mm ± 2.5 mm

PRÉSENTATION				
RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	UNITÉ/BOÎTE	DIMENSIONS BOÎTE (cm)	POIDS BOÎTE** (kg)
0030220	DISPOMEDIC SCRUB C PLUS	100	38 x 21 x 35 Boîte avec ouverture latérale	3.5
0030220B	DISPOMEDIC SCRUB C PLUS *avec cure-ongle	100	38 x 21 x 35 Boîte avec ouverture latérale	3.6
0030220C	DISPOMEDIC SCRUB C PLUS	450	60 x 39.5 x 50.5 15 distributeurs de 30 unités.	18.1
0030220D	DISPOMEDIC SCRUB C PLUS *avec cure-ongle	450	60 x 39.5 x 50.5 15 distributeurs de 30 unités.	18.7

** TOLÉRANCES : Poids ± 0.5 Kg

CONFORME À :

Règlement (UE) 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la commercialisation et l'utilisation des produits biocides.

EN 1276:2010 Antiseptiques et désinfectants chimiques. Test quantitatif de suspension pour l'évaluation de l'activité bactéricide des antiseptiques et désinfectants chimiques utilisés dans le domaine alimentaire, industriel, domestique et communautaire. Méthode d'essai et exigences (phase 2/étape 1).

EN 13624:2014 Antiseptiques et désinfectants chimiques. Test quantitatif de suspension pour l'évaluation de l'activité fongicide ou lévuricide en médecine. Méthode d'essai et exigences (phase 2, étape 1).

EN 13727:2012 Antiseptiques et désinfectants chimiques. Test quantitatif de suspension pour l'évaluation de l'activité bactéricide dans le domaine médical. Méthode d'essai et exigences (phase 2, étape 1).

EN 1499 Antiseptiques et désinfectants chimiques. Lavage hygiénique des mains. Méthode d'essai et exigences (phase 2/étape 2).

N° REG. AEMPS : 449-DES