

Dispoglove

Einmal-Waschhandschuhe mit imprägnierter Seife

Dispoglove ist ein Einmal-Waschhandschuhe mit Seife, welcher einen großen Komfort bei der Körperreinigung bietet.

Hygienischer Waschhandschuh, speziell für Hygiene- und Gesundheitszwecke geeignet, zum Einmalgebrauch. Setzt seine pflegende Wirkung frei, wenn er mit Wasser in Kontakt kommt. Das Produkt enthält eine dermatologische Lotion, die zur Aufrechterhaltung der Schutzbarriere der Haut beiträgt und außerdem für ein angenehmes und frisches Aroma sorgt.

Ergonomisch geformt, um zu vermeiden, dass der Waschhandschuh während des Gebrauchs von der Hand rutscht.

Das Produkt ist speziell für die Pflege und Reinigung der Haut bestimmt, vor allem bei Personen, die auf Hilfe bei der Körperpflege angewiesen sind.



Produktinformationen

Lagen	Material	Gewicht	Größe
Vorderseite mit Seife	Synthetische Polyesterfaser. Latexfrei.	100g/m ² ±5%	25x17cm ±5%
Rückseite	Synthetische Polypropylenfaser (Vliesstoff). Latexfrei.	50g/m ² ±5%	

LOTION: Hautreinigendes gel, pH 5.5 ±0,5. Auch für Kinder geeignet.

Ingredients	Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Chloride, Cocamide Dea, Cocamidopropyl Betaine, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Citric Acid, Parfum, C.I. 61570, Linalool.
--------------------	---

Jeder Handschuh enthält 2-3g der Seife vor der Trocknung.

Mikrobiologische Qualitätskontrolle.

Dieses Gel wurde speziell mit konzentrierten feuchtigkeitsspendenden Inhaltsstoffen formuliert, um die Haut zu schützen. Dadurch kann die Schaumbildung während der Anwendung reduziert, ohne die hautreinigenden Eigenschaften zu beeinträchtigen.

Gebrauchsanweisungen



Wenige Tropfen Wasser genügen, um die Seife in **Dispoglove** aktivieren. **NICHT EINTAUCHEN.**

- Sanft einreiben und die Haut einschäumen.
- Mit Wasser abspülen.
- Die Haut gründlich trocknen.



Warnungen und Empfehlungen

Von Kindern fernhalten. Nicht schlucken. Den Kontakt mit den Augen vermeiden. Verwenden Sie ordnungsgemäß desinfizierte Geräte für jeden Patienten bzw. Reinigung. Verwenden Sie warmes Wasser für mehr Patientenkomfort. Nach Gebrauch entsorgen.

Lagerung und Haltbarkeit

Kühl und trocken lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Haltbarkeit: Fünf Jahre.

VERPACKUNG				
REFERENZ	EINHEITEN PRO PACK	EINHEITEN PRO KARTON	KARTONGRÖÖE (cm)	KARTONGEWICHT* (kg)
0000301	20 Einheiten	800 Einheiten 40 Pack	60x40x34	5.5

* TOLERANZ: Gewicht \pm 0.5 Kg

Individueller pack bar code: EAN13 8427835100392

Entspricht folgendem:

- Guter Herstellungspraxis für Kosmetik (GMP) gem. ISO 22716.
- Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. November 2009 über kosmetische Mittel.
- Getestet für die pädiatrische Anwendung.
- Dermatologisch getestet.
- Gynäkologisch getestet.
- ISO 22716 und ISO 9001 zertifiziertes Unternehmen.

