

# Dispomedic mask

## Masque chirurgical jetable

*Avec bande élastique, 3 couches.*



### CARACTÉRISTIQUES

Masque chirurgical rectangulaire, 3 couches, avec couche intérieure munie d'un filtre antibactérien, en tissu non tissé, sans particules, respirant. Avec des plis pour un meilleur ajustement anatomique.

Type IIR, non stérile. Dimensions : 175 x 95 mm ( $\pm 5$  mm)

Il est doté d'une barrette nasale interne en matériau malléable adaptable et résistant d'environ 9,5 cm. Couche de confort interne qui n'irrite pas la peau.

Élastiques de fixation arrondis.

Efficacité filtration bactérienne  $\geq 98$  %

Résistance à la respiration  $\leq 60,0$  Pa/cm<sup>2</sup>

Résistance aux éclaboussures  $\geq 16$  kpa

Propreté microbienne  $\leq 30$  cfu/g

Conditionnement dans une boîte distributrice.

Sans latex

Conforme à la norme UNE-EN 14683:2019+AC

### MODE D'EMPLOI



1. Placer le masque avec la face colorée vers l'extérieur et le pince-nez vers le haut.



2. Tirer sur les élastiques et les placer dans les deux oreilles.



3. Appuyer sur le pince-nez pour qu'il soit le plus ajusté possible, tirer et déplier le masque vers le bas pour couvrir complètement la bouche et le nez.

**AVERTISSEMENTS ET RECOMMANDATIONS**

L'utilisation par plus d'un patient peut entraîner une infection croisée.  
 Ne pas utiliser le produit sur une peau blessée.  
 Ne pas utiliser le produit s'il est contaminé, sale ou manifestement endommagé.

**STOCKAGE ET DURÉE D'UTILISATION**

Ne pas exposer à la lumière du soleil. Le garder au sec.  
 Expiration : 3 ans.

PRÉSENTATION			
RÉFÉRENCE	UNITÉS BOÎTE	DIMENSIONS BOÎTE (cm)	POIDS BOÎTE (kg)*
9000100	2000 unités (50 unités/boîte distributrice 40 boîtes distributrices/boîte)	Boîte distributrice 18.5x10x8 Boîte 50x39x34	8.5

TOLÉRANCE DE POIDS ±10 %

**CONFORME À :**

- Directive 93/42/CEE du Conseil, Directive 2007/47/CE du Parlement européen et du Conseil et Règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil.
- Classe I, non stérile (conformément à l'Annexe IX de la Directive 93/42 et à l'Annexe VIII du Règlement 745/2017).
- UNE-EN 14683:2019+AC:2019 Masques chirurgicaux. Exigences et méthodes d'essai.
- Entreprise certifiée ISO 13485 et ISO 9001.
- Licence de Fonctionnement Fabricant et Importateur Dispositifs Médicaux N° : 3689-PS.

