

## Rivestimento stecca Braun Comfort

### Prodotto sanitario

#### INDICAZIONI

Il **Rivestimento stecca Braun Comfort** serve come protezione della stecca Braun per evitare che le prominenze ossee causino ulcera da pressione.



#### COMPOSIZIONE

Parte anteriore: 100% velluto.

Imbottitura interna: Schiuma di poliuretano ad alta densità.

Parte posteriore centrale: Rete traspirante 100% poliammide; rinforzo centrale in schiuma di poliuretano ad alta densità.

Parte posteriore laterale: 100% cotone.

#### MODALITÀ D'USO

- Rimuovere il prodotto dalla confezione.
- Aprire il rivestimento.
- Posizionare il rivestimento sulla stecca Braun regolandolo con il sistema velcro.

#### CARATTERISTICHE

Materiale traspirante che può essere facilmente lavato. Tessuto fresco e confortevole.

Aiuta a mantenere la postura ideale e impedire che le prominenze ossee causino ulcera da pressione. Molto facile da regolare. Un unico punto di regolazione tramite il sistema di velcro.

#### AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

L'uso da parte di più di un paziente può provocare un'infezione crociata. Non usare il prodotto sulla pelle ferita.

Non utilizzare il prodotto se è contaminato, sporco o evidentemente danneggiato.

#### CONSERVAZIONE E DURATA

Mantenere al riparo dalla luce solare. Tenere asciutto. Scadenza: 5 anni.

**MISURE UNITÀ DI PRODOTTO**

RIFERIMENTO	MODELLO	L (cm)	A (cm)
1000311	GRANDE	105	54
1000321	MEDIO	95	54
1000301	PICCOLO	85	54

PRESENTAZIONE			
RIFERIMENTO	UNITÀ SCATOLA	MISURE SCATOLA (cm)	PESO SCATOLA (kg)*
1000311	12 unità/scatola	76,5x62x46,5	7,7
1000321	12 unità/scatola	76,5x62x46,5	7,7
1000301	12 unità/scatola	76,5x62x46,5	6,6

TOLLERANZA DI PESO ±10%

**CONFORME A:**

- Direttiva 93/42/CEE del Consiglio, Direttiva 2007/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- Classe I, non sterile (secondo l'Allegato IX della Direttiva 93/42 e l'Allegato VIII del Regolamento 745/2017).
- Azienda certificata ISO 13485 e ISO 9001.
- Licenza di esercizio fabbricante di dispositivi medici n.: 3689-PS.

