

Immobilizzatore per spalla grigio

INDICAZIONI

L'**Immobilizzatore per spalla grigio** è un dispositivo medico utilizzato per il sostegno e l'immobilizzazione di braccio/spalla con lesioni o fratture.

COMPOSIZIONE

Prodotto realizzato in materiale poliammidico e poliuretano a tre strati, con anelli in polipropilene. Cinghia di supporto per le dita in poliestere.



MODALITÀ D'USO



- Aprire l'immobilizzatore, allargando le cinghie.
- Posizionare il braccio nell'immobilizzatore. Appoggiare il pollice e regolare la cinghia B.
- Il braccio del paziente deve poggiare su di esso ad angolo retto.
- Tirare la cinghia di sostegno A sul braccio e regolare la misura con l'anello B.
- Passare l'altra cinghia di sostegno intorno al petto, immobilizzando il braccio.

CARATTERISTICHE

Progettato per una facile applicazione e regolazione. Ha un sistema velcro per la chiusura e la regolazione.

Sostiene l'avambraccio e il polso. Incorpora una cinghia di sostegno per il pollice.

È dotato di una cinghia verticale regolabile con ganci, la cui funzione è quella di distribuire il peso del braccio su schiena e spalla per un maggiore comfort. La fascia toracica limita il movimento della spalla.

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

L'uso da parte di più di un paziente può provocare un'infezione crociata. Non usare il prodotto sulla pelle ferita.

Non utilizzare il prodotto se è contaminato, sporco o evidentemente danneggiato.

CONSERVAZIONE E DURATA

Mantenere al riparo dalla luce solare.
Tenere asciutto. Scadenza: 5 anni.

MISURE UNITÀ DI PRODOTTO

Per determinare la taglia da scegliere, misurare la lunghezza dell'avambraccio dal gomito alle nocche.



RIFERIMENTO	MODELLO	LUNGHEZZA (cm)	LARGHEZZA (cm)	L. Cinghia (cm)	A. Cinghia (cm)
1000720	XL	49	19	Torace: 140 Collo: 110	5
1000721	L	46	17	Torace: 140 Collo: 110	5
1000722	M	42	16	Torace: 140 Collo: 110	5
1000723	S	31	14	Torace: 75 Collo: 75	5
1000724	XS	26	11	Torace: 75 Collo: 75	5

PRESENTAZIONE			
RIFERIMENTO	UNITÀ SCATOLA	MISURE SCATOLA (cm)	PESO SCATOLA* (kg)
1000720	10 unità/scatola	31*21*23	1,14
1000721	10 unità/scatola	31*21*23	0,97
1000722	10 unità/scatola	31*21*23	0,77
1000723	10 unità/scatola	30*22*15	0,7
1000724	10 unità/scatola	30*22*15	0,7

*TOLLERANZE: Peso \pm 0,2 kg

CONFORME A:

- Direttiva 93/42/CEE del Consiglio, Direttiva 2007/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- Classe I, non sterile (secondo l'Allegato IX della Direttiva 93/42 e l'Allegato VIII del Regolamento 745/2017).
- Azienda certificata ISO 13485 e ISO 9001.
- Licenza di esercizio fabbricante di dispositivi medici n.: 3689-PS.

