

## Immobilizzatore per spalla a rete




### INDICAZIONI

Il **immobilizzatore per spalla a rete** è un dispositivo medico utilizzato per il sostegno e l'immobilizzazione di braccio/spalla con lesioni o fratture.

### COMPOSIZIONE

Prodotto composto da rete e cinghie di sostegno in poliesteri, con anelli in polipropilene.

### MODALITÀ D'USO

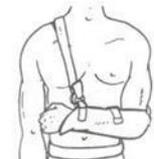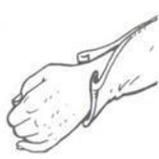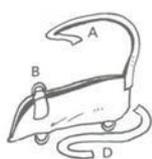

- Aprire l'immobilizzatore dispiegando le cinghie.
- Posizionare il braccio.
- Il braccio del paziente deve poggiare su di esso ad angolo retto.
- Tirare la cinghia di sostegno "A" sul braccio e regolare la misura con l'anello "B".
- Passare l'altra cinghia di sostegno intorno al torace, fissando le estremità della cinghia a "D" con gli anelli inferiori.
- Una cinghia di sostegno per il dito è inclusa all'interno dell'immobilizzatore.

### CARATTERISTICHE

Progettato per una facile applicazione e regolazione.

Ha un sistema in velcro per la chiusura e la regolazione dell'inclinazione.

Sostiene l'avambraccio e il polso. La fascia toracica limita il movimento della spalla.

È dotato di una cinghia verticale regolabile con ganci, la cui funzione è quella di distribuire il peso del braccio su schiena e spalla per un maggiore comfort. Incorpora una cinghia di sostegno per il pollice.

Materiale leggero, confortevole e traspirante, senza perdere resistenza o adattabilità al corpo.

### AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

L'uso da parte di più di un paziente può provocare un'infezione crociata. Non usare il prodotto sulla pelle ferita.

Non utilizzare il prodotto se è contaminato, sporco o evidentemente danneggiato.

### CONSERVAZIONE E DURATA

Mantenere al riparo dalla luce solare.  
Tenere asciutto. Scadenza: 5 anni.

### MISURE UNITÀ DI PRODOTTO

Per determinare la taglia da scegliere, misurare la lunghezza dell'avambraccio dal gomito alle nocche.



RIFERIMENTO	MODELLO	LUNGHEZZA (cm)	LARGHEZZA (cm)	L. Cinghia (cm)	A. Cinghia (cm)
1012825	L	46	21	Torace: 111 Collo: 97	4 4
1012835	M	40	19	Torace: 108 Collo: 97	4 4
1012845	S	32	16	Torace: 74 Collo: 74	4 4

PRESENTAZIONE			
RIFERIMENTO	UNITÀ SCATOLA	MISURE SCATOLA (cm)	PESO SCATOLA (kg)
1012825	10 unità/scatola	21x15x15	0,59
1012835	10 unità/scatola	21x15x15	0,57
1012845	10 unità/scatola	21x15x15	0,45

### CONFORME A:

- Direttiva 93/42/CEE del Consiglio, Direttiva 2007/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- Classe I, non sterile (secondo l'Allegato IX della Direttiva 93/42 e l'Allegato VIII del Regolamento 745/2017).
- Azienda certificata ISO 13485 e ISO 9001.
- Licenza di esercizio fabbricante di dispositivi medici n.: 3689-PS.

