

Protezione per occhi

INDICAZIONI

La **Protezione per occhi** è un dispositivo medico utilizzato come protettore oculare pediatrico, indicato per la fototerapia.

COMPOSIZIONE

Prodotto con materiale a tre strati, interno in cotone, esterno in poliammide e imbottitura in schiuma di poliuretano.



MODALITÀ D'USO

- Posizionare la protezione davanti agli occhi del paziente e fissarla con il sistema in velcro.
- Far passare la cinghia di sostegno sopra la testa e fissare la protezione con il sistema in velcro. Tagliare l'estremità in eccesso, se necessario.

CARATTERISTICHE

Il prodotto è regolabile tramite il sistema in velcro, il cinturino in gomma elastica e il materiale dello strato esterno. Il prodotto è traspirante, non irritante, antiallergico. Il sistema di chiusura in velcro permette un fissaggio efficace ed efficiente.

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

L'uso da parte di più di un paziente può provocare un'infezione crociata. Non usare il prodotto sulla pelle ferita.

Non utilizzare il prodotto se è contaminato, sporco o evidentemente danneggiato.

CONSERVAZIONE E DURATA

Mantenere al riparo dalla luce solare. Tenere asciutto.
Scadenza: 5 anni.

MISURE UNITÀ DI PRODOTTO

Per scegliere la misura corretta, bisogna prendere in considerazione la circonferenza della testa e la superficie dell'occhio da proteggere:

RIFERIMENTO	MODELLO	CIRCONFERENZA TESTA	SUPERFICIE OCCHIO	FASCIA SUPERIORE
1029050	EXTRA PICCOLO	25-30 cm	4x8 (cm)	25 cm
1029100	PICCOLO	30-35 cm	5x8 (cm)	29 cm
1029150	MEDIO	32-37 cm	6x9 (cm)	35 cm

PRESENTAZIONE			
RIFERIMENTO	UNITA SCATOLA	MISURE SCATOLA (cm)	PESO SCATOLA (kg)
1029050	25 unità/scatola	20x15x15	0,4
1029100	25 unità/scatola	20x15x15	0,4
1029150	25 unità/scatola	20x15x15	0,42

CONFORME A:

- Direttiva 93/42/CEE del Consiglio, Direttiva 2007/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- Classe I, non sterile (secondo l'Allegato IX della Direttiva 93/42 e l'Allegato VIII del Regolamento 745/2017).
- Azienda certificata ISO 13485 e ISO 9001.
- Licenza di esercizio fabbricante di dispositivi medici n.: 3689-PS.

